



Подушки Invacare® Flo-tech

и комплект дополнительных вставок Flo-tech Solution Xtra Box

Руководство по эксплуатации*

**Перед началом эксплуатации подушек внимательно ознакомьтесь с данным руководством.*

Введение

Настоящее руководство содержит подробную информацию о функциональном назначении и эксплуатационных особенностях подушек **Invacare®** модельного ряда **Flo-tech**.

Инструкция подходит для следующих моделей подушек: Flo-tech Lite, Flo-tech Contour, Flo-tech Contour Lo Back, Flo-tech Image, Flo-tech Solution Xtra, подушек под спину: **Flo-tech Back Support, Flo-tech Lumbar Pad** и комплекта дополнительных вставок: **Flo-tech Solution Xtra Box** (далее — подушки).

Область применения / показания

Подушки **Invacare® Flo-tech** снижают давление на тело и стабилизируют положение пользователя. Они могут применяться для профилактики и лечения пролежней (см. таблицу), а также для обеспечения комфортного положения при сидении в кресле-коляске.

Ограничение использования / противопоказания

Максимальная нагрузка на подушки **Invacare®** не должна превышать значения, указанные в приведенной далее таблице.

В зависимости от типа и размера, вес подушек **Invacare®** варьируется от 0,5 кг до 3,5кг.

Состав подушек:

Внутренняя часть подушек изготовлена из высокоэластичного вспененного формованного поролона, имеющего, в зависимости от модели, различную плотность и форму.

Подушки **Invacare® Flo-tech Image, Invacare® Flo-tech Solution Xtra** дополнительно оснащены гелевыми подкладками, оптимизирующими распределение давления на тело. Гелевые подкладки содержат нетоксичный медицинский силикон.

Внешний чехол состоит из биэластичной водонепроницаемой стреч ткани с внутренним защитным слоем, имеет нескользящую поверхность на нижней стороне. На передней стороне чехла расположена удобная ручка для переноски.

Технические характеристики / Модель	Материал	Макс. нагрузка, кг	Материал чехла	Степень пролежней	Габариты, ВхШхД, см	Чистка	Вес, кг	Гелевая подушка
Flo-tech Lite	высокоэластичный вспененный формованный поролон	127	эластичный стрейч, водонепроницаемый, "дышащий"	1	7,8x46x46	80	1,5	Опция
Flo-tech Contour	высокоэластичный вспененный формованный поролон	152	эластичный стрейч, водонепроницаемый, "дышащий"	2	10,3x46x46	80	1,38	Опция
Flo-tech Contour Lo Back	высокоэластичный вспененный формованный поролон	152	эластичный стрейч, водонепроницаемый, "дышащий"	2	10,3*46x46 * 7,5 нижняя часть	80	1,38	Опция
Flo-tech Image	высокоэластичный вспененный формованный поролон	140	эластичный стрейч, водонепроницаемый, "дышащий"	4	7,8x46x46	80	1,82	В комплекте
Flo-tech Solution Xtra	высокоэластичный вспененный формованный поролон	140	эластичный стрейч, водонепроницаемый, "дышащий"	3	7,8x46x46	71	3,08	В комплекте
Flo-tech Back Support	высокоэластичный вспененный формованный поролон	165	эластичный стрейч, с вентиляционными отверстиями	—	17x46x46	80	1	Не предусмотрена
Flo-tech Lumbar Pad	вязкоэластичный поролон низкой плотности, пенополиэтирол	—	ткань	—	5x42x20	80	0,5	Не предусмотрена
Flo-tech Solution Xtra Box	высокоэластичный поролон (СМНР (огнеупорный))	140	—	—	—	71	3,3	В комплекте

Проверка размера подушки

Убедитесь в том, что размеры подушки соответствуют размерам коляски и/или Вашего тела.

Укладка подушки в чехол:

1. Снимите прозрачную упаковку.
2. Полностью откройте застежку-молнию внешнего чехла.
3. Вставьте подушку во внешний чехол.
4. Закройте застежку-молнию внешнего чехла.
5. Используйте подушку только с надетым внешним чехлом.

Подготовка к использованию:

1. Положите подушку на сидение коляски.
2. Сядьте на подушку, чтобы она адаптировалась к форме Вашего тела.
3. Отрегулируйте высоту подножек коляски. Ноги должны располагаться на подножках, а бедра полностью лежать на подушке.

Применение:

Регулярно, особенно, в первые дни применения подушки, проверяйте кожу на наличие покраснений в месте соприкосновения с подушкой. Если возникшие покраснения не исчезают в течении 15 минут, прекратите использовать подушку и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение в автомобилях

В настоящее время компания Invascare® не располагает результатами испытаний в отношении безопасного применения подушек Flo-tech в автомобилях

Безопасность

Не применяйте и не храните подушку вблизи источников огня и/или тепла.

Уход и чистка



Внимание! Не чистите подушку с применением горячего пара или высокого давления! Чистка при высоких температурах и давлении может привести к повреждениям подушки.

Чистка наполнителя подушки:

- Протрите внутренний наполнитель подушки салфеткой, смоченной неабразивным чистящим средством. Сильные загрязнения можно вначале намочить, а затем удалить мягкой щеткой;
- Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Не применяйте при чистке острые предметы;
- Не окунайте внутренний наполнитель подушки в воду или другие жидкости;
- Не стирайте внутренний наполнитель подушки в стиральной машине.

Чистка чехла

Внешний чехол можно стирать в стиральной машине. Соблюдайте указания, приведенные на этикетке на внутренней стороне чехла.

Дезинфекция

Дезинфекцию подушки следует проводить дезинфицирующим аэрозолем.

Подушки под спину **Invacare® Flo-tech Back Support** и **Invacare® Flo-tech Lumbar Pad**

Подушки под спину **Invacare® Flo-tech Back Support** и **Invacare® Flo-tech Lumbar Pad** могут применяться при риске возникновения пролежней, для исключительной степени комфорта и защиты от деформации позвоночника. Уникальная поддерживающая конструкция предотвращает сползание. Спинка может использоваться в сочетании с любой из подушек **Invacare® Flo-tech**.

Если требуется дополнительная поддержка поясницы используйте спинку **Invacare® Flo-tech Back Support** вместе с подкладкой **Invacare® Flo-tech Lumbar Pad**. Ремни подушек регулируются в соответствии с индивидуальными потребностями и повышают степень комфорта.

Комплект дополнительных вставок **Invacare® Flo-tech Solution Xtra Box**

Модульная система **Invacare® Flo-tech Solution Xtra Box** позволяет дополнять подушку **Invacare® Flo-tech Solution Xtra**, при помощи комплекта вставок-подушечек.

Использование **Invacare® Flo-tech Solution Xtra Box** повышает эффективность терапевтических мероприятий, направленных на улучшение осанки, повышение комфорта и предотвращение возникновения пролежней. Компоненты изготовлены из высокоэластичного поролонa CMHR*. Все элементы крепятся на подушке **Flo-tech Solution Xtra** с помощью фиксаторов **Velcro**. Клиновидные элементы и модульные компоненты способствуют активной коррекции осанки.

Комплект:

- Элемент жесткости – 1 шт.
- Гелевая подушечка – 1 шт.
- Выравнивающий элемент для бедра – 2 шт.
- Выравнивающий элемент для таза – 2 шт.
- Выступ (поддерживающий) стандартный и глубокий – 2 шт.
- Передний клиновидный элемент – 1 шт.
- Боковые клиновидные элементы – 2 шт.
- Поперечные клиновидные элементы – 2 шт.

* высокоэластичный с добавлением огнегасящих веществ

Гарантия

Гарантийный срок на подушки **Invacare® Flo-tech** составляет 3 года, а на **Flo-tech Lumbar Pad** — 1 год. Гарантия действует при условии надлежащей эксплуатации подушек. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащим применением, неправильной чисткой и уходом или небрежным обращением, а также в случаях естественного износа.

Стандарты качества и невозгораемость

Подушки **Invacare®** соответствуют требованиям ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003 и директиве ЕС касательно медицинских продуктов.

Подушки **Invacare® Flo-tech** прошли независимые испытания согласно нормам BS5852:1990 и BS7175:1989 с применением источников огня 0, 1 и 5.

Орган сертификации: ООО "РСТ-ГРУПП" РОСС RU.0001.11AG13

Срок действия: Отказное письмо № 60-02/14 от 08.05.2014 - бессрочно

Произведено: Invacare Deutschland GmbH, Kleisistraße 49, 32457 Porta Westfalica, Германия

Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend, CF 35 5 HZ, Соединенное королевство

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6ю

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6; ул. Свободы д.35/5, тел. 8(495)792-31-90

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, для улучшения технических характеристик продукта, и не несет ответственности за возможные ошибки в содержании руководства по эксплуатации.

