



Противопролежневая подушка

## **Aero-tech 4**

Руководство к применению

---

## Предназначение

Подушка Invacare Aero-tech 4 является воздушной подушкой с четырьмя клапанами и четырьмя независимыми секциями (т.е. передние-2шт. (левая и правая), задние-2 шт. (левая и правая)), специально разработанной для пациентов с очень высокой степенью развития пролежней.

## Характеристики

Наименование	Invacare Aero-tech 4
Материал	натуральный каучук с вулканизированной поверхностью
Материал чехла	стрейч
Количество клапанов	4
Количество секций	4
Чистка	60°
Макс. нагрузка	150 кг
Размеры	47x47x10 см.

## Инструкция по эксплуатации

1. Извлеките подушку Invacare Aero-tech 4 из упаковки.
2. Отвинтите все 4 клапана, повернув против часовой стрелки.
3. Присоедините трубку насоса к клапану подушки.
4. Накачайте подушку
5. Завинтите все 4 воздушных клапана по часовой стрелки.

## Сборка и настройка

Подушка Aero-tech 4 разделена на четыре независимые секции, жесткость которых можно отрегулировать с помощью четырех независимых воздушных клапанов

Посадите пациента на подушку и отрегулируйте жесткость.

Для регулировки жесткости подушки, сначала следует спустить воздух из задних секции подушки, а затем - передних. Процедуру можно произвести самостоятельно, поочередно сдувая секции.

Спустите воздух таким образом, что пациент удобно погрузился в подушку, но при этом, обратите внимание, чтобы подушка не сдулась полностью.

**Внимание!** После проведения регулировок и настроек, следует проверить переднюю верхнюю подвздошную ось для того, чтобы убедиться, что таз находится в ровном положении или он поддерживается поперечным наклоном.

## **Комплектация**

Подушка, чехол, насос, руководство пользователя и набор для ремонта.

## **Уход и обслуживание**

Машинная стирка чехла (при 40°C - 60°C) и подушки (при 30°C - 40°C).

**Пожалуйста, перед стиркой убедитесь, что все клапаны подушки закрыты.**

Подушки Invacare Aero-tech 4 устойчивы к воздействию соленой воды. Подушка изготовлена из натуральной резины, поэтому изделие не должно подвергаться воздействию солнечных лучей, что может привести к преждевременному износу изделия.

Требования по хранению, уходу и обслуживанию составлены в соответствии с DIN 7716.

## **Гарантия**

Гарантия на подушку Invacare Aero-tech 4 - 2 года.

Ограничения при использовании

Минимальный вес пациента 20 кг. Максимальная нагрузка составляет 150 кг.

**Подушка Aero-tech 4 не содержит латексных аллергенов.**

Перед использованием следует провести тест на аллергические реакции.

## **Срок службы**

Срок службы воздушной подушки Aero-tech 4 составляет 3 года.

## Сертификат и адрес мастерской

**Орган сертификации:** ООО "РСТ-ГРУПП" РОСС RU.0001.11AG13

**Срок действия:** Отказное письмо № 60-02/14 от 08.05.2014 - бессрочно

**Произведено:** Invacare Deutschland GmbH, Kleisistraße 49, 32457 Porta Westfalica, Германия

Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend, CF 35 5 HZ, Соединенное королевство

**Поставщик:** ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_  
(с расшифровкой подписи)

М.П.

*Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарнтии.*

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

**Адрес гарантийной мастерской:** г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6; ул. Свободы д.35/5 Тел:(495) 792-31-90

