



# Персональный алкотестер Динго А-055

Руководство по эксплуатации



## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	3
1.1 Назначение .....	3
1.2 Технические характеристики .....	4
1.3 Упаковка.....	4
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы .....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	8
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ .....	9
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	13

Поздравляем Вас с приобретением алкотестера Динго А-055. Он определит содержание алкоголя у Вас в крови в течение нескольких секунд.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго А-055 (далее – алкотестер).

Перед использованием прочтите, пожалуйста, данное руководство.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Алкотестер Динго А-055 представляет собой персональный анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Измеренное значение концентрации паров алкоголя в легких пересчитывается в концентрацию в крови и выводится на трехразрядный цифровой дисплей в единицах г/л (или промилле - грамм алкоголя в литре крови).

## 1.2 Технические характеристики

тип датчика	полупроводниковый
диапазон показаний	0,00–4,00 промилле
минимальное ненулевое значение	0,10 промилле
дискретность шкалы	0,01 промилле
время установки показаний	2 секунды
время подготовки	до 60 секунд
число тестов до замены батареек	около 100 тестов
рабочая температура	0–40°C
питание	2 батарейки АА
размеры	110 x 46 x 20 мм
вес	92 г
периодичность тех. обслуживания	300 тестов или раз в 12 месяцев
срок службы	3 года

### 1.3. Упаковка

В комплектации: алкотестер, 2 батарейки АА, 5 мундштуков, руководство по эксплуатации.

## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:



1. Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления алкоголя, пищи или курения прежде чем приступить к продуванию. В противном случае алкотестер может выдать неправильные показания, либо это может привести к повреждению чувствительного к алкоголю датчика.
2. Для каждого повторного измерения используйте новый мундштук.
3. Для питания используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки.
4. Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести прибор из строя.
5. Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметичка) или нагревательных приборов.
6. Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в помещении с загрязненной атмосферой.

7. Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать (заменять сенсорный элемент) приблизительно через каждые 300 тестов, либо раз в год, а также при появлении предупреждающей надписи на дисплее.

8. Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы, приводящие к повышению концентрации кетонов в выдохе, могут вызывать ложноположительные результаты. Проконсультируйтесь с врачом.

9. Срок службы датчика и точность показаний существенно уменьшаются при:

а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя

б) использовании алкотестера для массовых проверок

10. Алкотестер Динго А-055 не предназначен для профессиональной деятельности. Показания прибора не являются доказательными – независимо от количества выпитого спиртного не следует садиться за руль.

## 2.2 Порядок работы

### 2.2.1 Включение

Перед началом работы вставьте в прибор две алкалиновые батарейки АА (пальчиковые) и новый мундштук.

Для включения нажмите кнопку. Раздастся звуковой сигнал. При удержании кнопки на дисплее поочередно появляются показание счетчика тестов и результат последнего измерения, после отпускания происходит обратный отсчет до нуля. В течение этого времени происходит самотестирование прибора и разогрев датчика. По завершении отсчета прозвучит звуковой сигнал готовности к продуванию.

### 2.2.2 Проведение теста

Начало продувания сопровождается включением звукового сигнала. Необходимо производить продувание в мундштук непрерывно с умеренной силой в течение около 5 секунд, до окончания звукового сигнала. При срыве теста из-за преждевременного прекращения или недостаточной силы выдоха на дисплее высвечивается сообщение «Flow» в комбинации с одиночным сигналом.

Нормальное завершение выдоха сопровождается двойным звуковым сигналом.

### 2.2.3 Считывание результатов

При нормальном завершении продувания на дисплее высвечивается цифровое значение концентрации алкоголя в крови.

### 2.2.4 Выключение

Показания остаются на дисплее в течение 15 секунд, затем алкотестер Динго А-055 автоматически выключается.

Принудительно прибор можно выключить в любой момент нажатием и удержанием кнопки включения, при этом на дисплее загорается надпись Out.

Если не пользоваться прибором более 30 секунд после достижения готовности, он выключится автоматически.

### 2.2.5 Замена батареек

Если прибор не включается или на дисплее загорается надпись bat, необходимо заменить батарейки. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.

**Внимание!** Меняйте обе батарейки одновременно. Используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки. Показания прибора с разряженными батарейками могут не соответствовать реальным. На одном комплекте батареек можно провести до 100 тестов.

## 3. техническое обслуживание

Техническое обслуживание анализатора производится с целью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.

Алкотестер Динго А-055 поступает в продажу с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. В процессе работы чувствительный к алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит к постепенному росту



погрешности измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестеров в специализированном сервисном центре. Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования прибора. В среднем необходимо производить настройку через каждые 300 тестов, либо раз в год, а также при появлении предупреждающей надписи на дисплее, означающей, что прибор нуждается в калибровке.

## 4. условия гарантии

### Условия гарантии

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением технического обслуживания, вызванного естественным износом датчика.

Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных сервисных центрах.

Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на средства покупателя.

Срок гарантии – 12 месяцев.

**Внимание!** Гарантия на сенсор – 12 месяцев или 300 тестов. Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по эксплуатации с указанием серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений,

вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.

5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых.

6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров.

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Алкотестер Динго А-055  
Производитель: Sentech Korea Corp.

Поставщик: ООО «СИМС-2»  
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6  
Тел./факс : (495) 792-31-90  
(800) 200-31-90;



[www.alcotester.ru](http://www.alcotester.ru)  
[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

# Приложение 1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

<b>ООО «СИМС-2»</b> <small>Наименование организации изготовителя, филиала, инст. (объекта) индивидуального предпринимателя, применяемых сокращений о соответствии</small>	
<b>Инспекция ФНС № 33 по г. Москве</b> <b>Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 24.08.2009</b> <small>(Следует в декларации указать для индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дату регистрации, регистрационный номер)</small>	
<b>ИНН 7734197385</b> <b>125363, г. Москва, ул. Новоселовская, дом 6</b> <b>тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, marmen@sims2.ru</b> <small>(адрес, телефон, факс)</small>	
в лице	<b>Генерального директора Бадалина Саргиса Павели</b> <small>(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)</small>
<b>Алкотестеры: Dingo A-025(Динго А-025), Dingo A-055(Динго А-055), Dingo A-065(Динго А-065), Dingo A-070(Динго А-070), Dingo pro (Динго про), Dingo screen(Динго скрин), Dingo C-08(Динго С-08), Dingo C-12(Динго С-12), Dingo E-200(Динго Е-200) с принадлежностями: принтер, адаптер, кабель соединительный, карта памяти и кейс</b> заявляют, что	
<b>Изготовитель продукции: SENTECH KOREA CORP.</b> <b>#63-23 Shinchon-Ri, Gyoha-Eup, Paju-si, Gyeonggi-do 413-832 Republic of Korea</b> <b>Код ОК 005 (ОКП) 421510. Код ТН ВЭД СНГ 9027 10 100 0.</b> <small>(Наименование, тип, марка продукции, на которую производится декларация, код ОК 005-03 в инст. ТН ВЭД СНГ)</small>	
<b>Серийный Выпуск</b> <small>(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделия, единицы дозирования, название наименования изготовителя и т.п.)</small>	
соответствует требованиям <b>ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р 51522-99</b>	
<small>Обозначение сертификата документа, соответствие которому подтверждено данной декларацией с указанием пункта, содержащего требования для данной продукции</small>	
Декларация принята на основании <b>Сертификат РОСС KR ME77.H00242 от 13.11.2012 ОС ООО «Элмаш» (РОСС RU.0001.11 ME77);</b> <b>протокол испытаний № 294M11EM от 12.11.2012 ИЦ ООО «Элмаш» (№ РОСС RU.0001.21MI04)</b> <small>(Идентификация документов, являющихся основанием для принятия декларации)</small>	
Дата принятия декларации	<b>13.11.2012</b> Декларация о соответствии действительна до <b>13.11.2017</b>
<b>М.П.</b>  <small>(Подпись)</small>	
<b>С.П.Бадалин</b> <small>(Инициалы, фамилия)</small>	
Сведения о регистрации декларации о соответствии <b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ</b> <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)</b> <b>Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME77.</b> <b>141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29</b> <b>Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@elmas.ru</b> <small>(Указание в адрес органа по сертификации, стандартизации и систем качества)</small> <b>№ РОСС KR ME77.D00241 от 13.11.2012</b> <small>(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)</small>	
<b>М.П.</b>  <small>(Подпись)</small>	
<b>Д.А.Дружинин</b> <small>(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)</small>	

