

МЕТ INTEGRA (BLY-1) Кровать функциональная медицинская электрическая со встроенным креслом-каталкой

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 4
4.	Технические характеристики	стр. 4
5.	Кровать в деталях	стр. 5
6.	Установка кровати	стр. 6
7.	Положения кровати	стр. 6
8.	Беспроводной пульт управления функциями кровати	стр. 7
8.1.	Первое включение пульта	стр. 7
9.	Интегрированная кресло-коляска	стр. 8
10.	Туалетное устройство	стр. 9
11.	Колеса кровати и кресла-каталки	стр. 10
12.	Боковые ограждения кровати	стр. 10
13.	Подлокотники кресла-каталки	стр. 11
14.	Очистка и дезинфекция	стр. 11
15.	Хранение	стр. 12
16.	Техническое обслуживание	стр. 12
17.	Комплект поставки	стр. 13
18.	Гарантийные обязательства	стр. 13

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях. Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана. Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоя электрической сети.



Запрещается опираться или садиться на ножную часть кресла-каталки, пересаживать на нее и вставать с нее, только с полностью опущенной до упора ножной частью!

3. Условия использования

Кровать предназначена для использования в медицинских целях. Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 220 V 50 Hz).

4. Технические характеристики

Габариты кровати	207 * 113 мм
Габариты ложа	193 * 98 мм
Высота ложа	55 мм
Угол наклона спинной секции	80 градусов
Угол наклона бедренной секции	45 градусов
Габариты встроенного кресла-каталки	177 * 60 см
Вес изделия	160 кг
Максимальная рабочая нагрузка	220 кг

5. Кровать в деталях



1. Головная спинка
2. Головная секция ложа
3. Туалетное устройство
4. Тазовая секция кровати и интегрированной кресла-каталки
5. Икроножная секция кровати и интегрированной кресла-каталки
6. Боковые ограждения кровати

7. Ножная спинка
8. Колеса кровати
9. Кнопка магнитного замка, фиксирующего встроенную кресло-каталку
10. Интегрированная кресло-каталка
11. Колеса кресла-каталки
12. Терапевтическая дуга

6. Установка кровати

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи пульта управления.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.



Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.




Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.



На опущенную ножную секцию садиться и вставать нельзя!
Это может привести к поломке изделия.


7. Положения кровати

7.1. Регулировка спинной секции

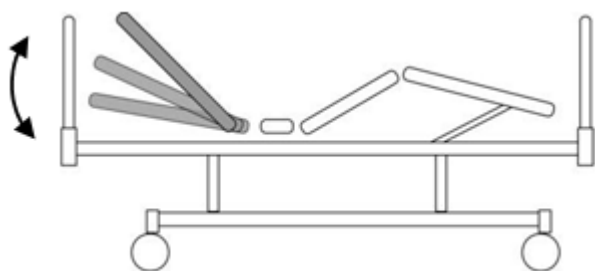


Спинная секция ложа может быть поднята или опущена от 0 до 80 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления

7.2. Регулировка икроножной секции

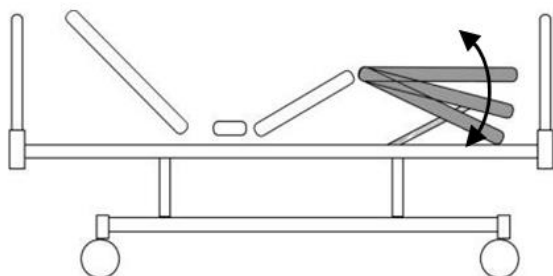


Икроножная секция ложа может быть поднята или опущена от 0 до 45 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления

8. Беспроводной пульт управления функциями кровати

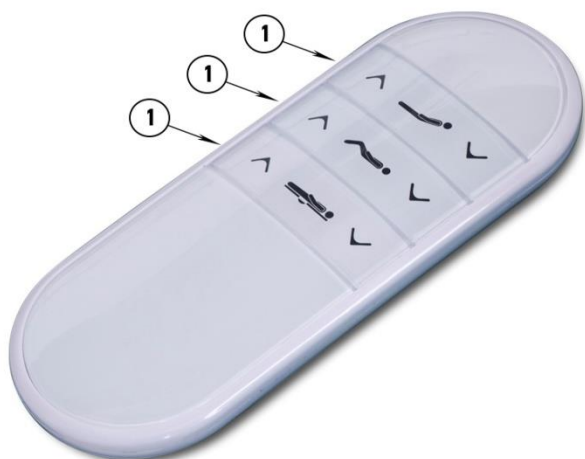


- 1 – Поднятие/опускание головной секции
- 2 – Поднятие/опускание бедренной секции
- 3 – Регулировка туалетного устройства

8.1. Первое включение пульта:

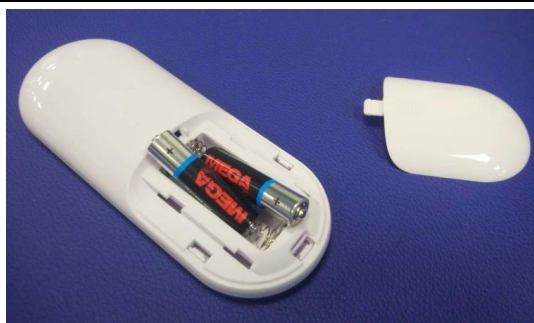

Установка батареек в пульт дистанционного управления кроватью

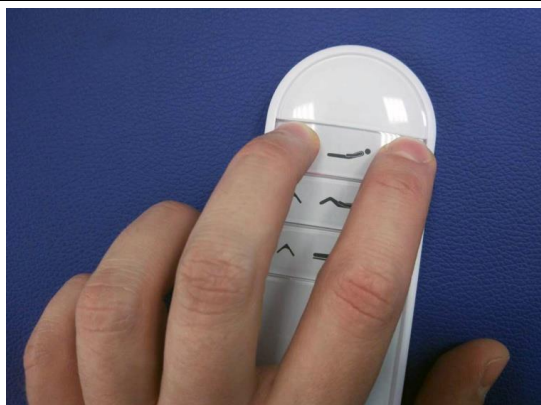

Для запуска кровати зажимаем 2 верхние кнопки на пульте



Одновременно зажимаем кнопку на приемнике, который находится в нижней части кровати

9. Интегрированная кресло-каталка



Чтобы воспользоваться интегрированной каталкой, слегка приподнимите спинку кровати с помощью пульта



Потяните за рычаг фиксатора спинной секции кровати, чтобы освободить спинную секцию кресла-каталки.

Внимание! Придерживайте спинку кровати, чтобы исключить ее резкое падение.



Приведите спинку кресла-каталки в вертикальное положение, а икроножную секцию – в нижнее положение



Снимите фиксатор (1) ножной спинки кровати и откатите ее вбок до упора

	<p>Нажмите на кнопку магнитного замка, удерживающего кресло-каталку</p>
	<p>Выкатите кресло-каталку</p> <p>ВАЖНО! Сделите, чтобы под кресло-каталку в процессе выката не попал провод электропитания.</p>
	<p>Вставьте подлокотники кресла-коляски в технологические отверстия (2) по бокам кресла-каталки и зафиксируйте «барашками»</p>

10. Туалетное устройство



Чтобы воспользоваться туалетным устройством, нужно вынуть заглушку сиденья и привести туалетное устройство в верхнее положение с помощью пульта управления



Для опорожнения туалетного устройства приведите его в нижнее положение при помощи пульта и вытащите туалетную емкость

11. Колеса кровати и кресла-каталки

Кровать и каталка установлены на 4 колесные опоры.
Каждое колесо оборудовано индивидуальным тормозом.



Положение 1.

Блокировка колеса

Чтобы заблокировать колесо, нажмите на рычаг тормоза так, как показано на фото.



Положение 2.

Разблокировка колеса


Поднимите вверх рычаг блокировки ногой, чтобы разблокировать колесо.



Нельзя перемещать кровать и кресло-каталку, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать или кресло-каталку, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

12. Боковые ограждения кровати

Боковые ограждения состоят из двух независимых друг от друга частей.

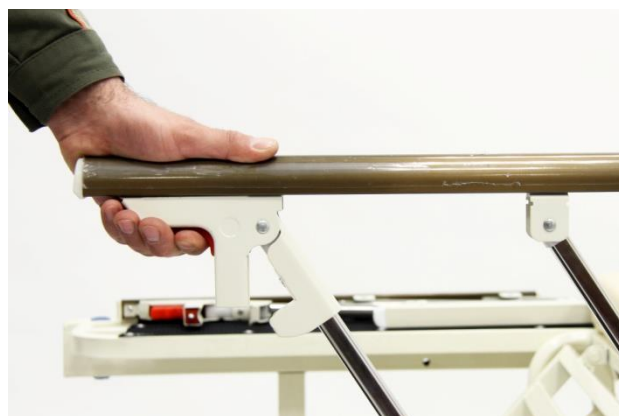


Чтобы сложить боковое ограждение в открытое положение, переместите нажмите на красный курок-фиксатор и потяните ограждение в сторону курка и вниз до принятия горизонтального положения.

Чтобы поднять боковое ограждение, потяните за него вверх до щелчка.



Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

13. Подлокотники кресла-каталки

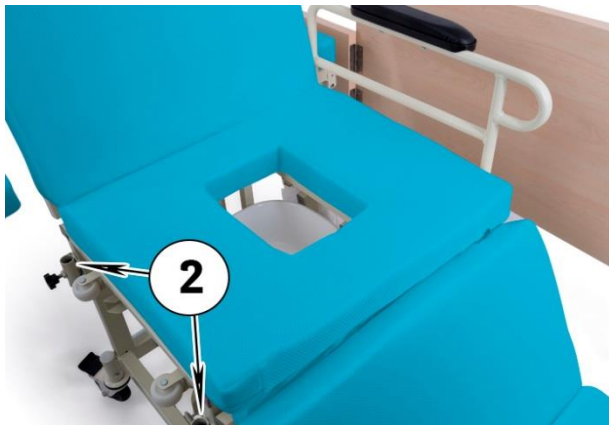

Подлокотники вставляются в технологические отверстия по боковым сторонам каталки и фиксируются «барашками»

14. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

15. Хранение

- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

16. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
4. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.



Если произойдут какие-либо сбои в двигателе или устройствах управления, не пытайтесь отремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо, кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

17. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- кресло-каталка – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

18. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____