

ОАО Вокс®

Техническое средство реабилитации инвалидов

КРЕСЛО - КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

“Кимба”

Руководство по эксплуатации



Кресло-коляска «Кимба» предназначена для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Это может возникнуть в результате:

- паралича
- потери конечностей
- деформации конечностей
- контрактуре суставов
- прочих заболеваний

Сертификат соответствия

Как изготовитель коляски фирма «ОТТО БОКК Мобилити Солюшнс ГмБХ» заявляет со всей ответственностью, что детская кресло-коляска «Кимба» соответствует всем требованиям EWG 93/42.

Рекомендации по безопасному использованию коляски

Перед использованием коляски для Вашей безопасности рекомендуем ознакомиться с данными рекомендациями:

- Коляска «Кимба» должна использоваться только на ровной и твердой поверхности.
- При преодолении лестниц или возвышенностей для безопасности рекомендуем прибегать к помощи двух человек.
- При преодолении ступенек, порогов и лестниц ставьте коляску на задние колеса (при движении на верх – потянуть немножко назад, при движении вниз – медленно опуская вперед)
- Поднимайте коляску только за литые или жестко привинченные детали:
- трубку передней рамы над передними колесами, заднюю ось, ручки для сопровождающего лица.
- При езде по возвышенностям или спускам крепко держите коляску за ручки для сопровождающего лица. При езде вдоль возвышенности коляска иначе может опрокинуться на бок, при езде по спуску произвольно укатиться.
- Избегайте ставить коляску на спуске, если однако это остро необходимо, ставьте ее в обратном направлении на тормозах.
- При сажании или высаживании ребенка из коляски ставьте ее на тормоза.
- При сажании или высаживании ребенка подножка не должна быть использована.
- Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 50 кг.
- Перед использованием коляски оба фиксирующих запора на раме должны быть жестко зафиксированы.
- Перед тем как начать движение на коляске, необходимо жестко закрепить и соединить подножки, чтобы не погнуть переднюю раму.
- Навешивание тяжелых сумок может негативно сказаться на стабильности коляски.
- Никогда не оставляйте Вашего ребенка в коляске без присмотра. Даже тогда, когда он зафиксирован ремнем, и коляска стоит на тормозах.

Распаковка и приведение коляски в рабочее состояние

В оригинальной упаковке Вы найдете следующие компоненты:

- сложенная рама с вмонтированными трубками для подножки
- подножка
- мягкое сидение
- абдуктор
- подголовник
- ремни крепления
- ручка для ребенка
- матрас – «мягкое сидение»
- инструкция по эксплуатации и необходимый инструмент
- заказанные Вами дополнительные комплектующие

Для того, чтобы привести коляску в рабочее состояние необходимо действовать следующим образом:

- аккуратно удалите упаковку и фиксатор, используемый при транспортировке ;
- поставьте правую ногу за левым задним колесом .
- Правую руку положите на правую ручку;
- Левую руку положите на рычаг для складывания коляски
- Легко потяните за коляску по направлению заднего колеса
- Обратите внимание, чтобы скользящая рама полностью легла на заклепку
- Слегка опрокинуть коляску через заднюю ось назад
- Рычаг для рас/складывания коляски нажать до раскрытия «ножниц» до упора

Внимание! Во избежании защемления рук раскладывать коляску только по описанному способу.

Подножка (первая сборка)

- Фиксирующую ось вставить в отверстие
- Боковые трубки вставить в отверстия для подножек на нужную высоту и затянуть винты.

В повседневной жизни действовать следующим образом:

- Подножку снаружи повернуть вовнутрь, подножки опустить вниз, фиксирующую ось вставить в отверстие.
- Обратит внимание, чтобы запирающие болты защелкнулись со звуком.

При сворачивании коляски действовать следующим образом:

- Убрать из коляски дополнительные детали.
- Подножку демонтировать в обратном порядке.
- Положить левую руку на рычаг для складывания коляски.
- Правую руку расположить на спинке коляски и потянуть за рычаг складывания коляски.
- Затем действовать в обратном порядке как при раскладывании.

- Под конец зафиксировать коляску фиксирующим ремнем.

Рекомендации по уходу за коляской

Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности советуем придерживаться следующих рекомендаций:

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску (50 кг)
- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые сумки, так как это негативно влияет на ее стабильность;
- не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, даже если он пристегнут ремнями, и коляска стоит на тормозе;
- после регулировки коляски следите, чтобы все винтовые крепления были хорошо затянуты;
- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими средствами;

Технические характеристики

Размер (см), вес (кг)	
Глубина сидения	19-40
Ширина сидения ок.	26-35
Высота спинки/ с удлинением	60/75
Угол наклона спинки	90°-130°
Высота подножки сидения	27-39
Вес базовой модели	13,5
Нагрузка	50
Диаметр передних колес	18
Диаметр задних колес	25
Параметры сложенной коляски	82 x 44 x 27

Условия гарантии

- 1) Гарантия на детскую инвалидную коляску на производственные дефекты предоставляется на 1 год.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и письменной рекламации бесплатно (согласно п.1).

- 3) Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия фирмы-изготовителя.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части.
- 6) Гарантия также прекращает свое действие, если монтаж оригинальных деталей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной изготовителем фирмой или не самим изготовителем.
- 7) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью фирмы-изготовителя.

Изготовитель: ОТТО БОКК Мобилити Солюшнс ГмбХ

Линденштрассе 13, Д-07426, Кенигзее, Германия

Тел.: (0 36 738) 79 0

Факс: (0 36 738) 79 200

Поставщик: ООО «ОТТО БОКК Сервис»

143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, участок 69 км МКАД, бизнес-парк «ГРИНВУД», строение 2

Тел.: (495) 564 83 60

Факс: (495) 564 83 63

E-mail: info@ottobock.ru

[http:// www.ottobock.ru](http://www.ottobock.ru)