



Опоры-ходунки

10185

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
2.2.1 Сборка изделия.....	4
2.2.2 Блокировка задних колес.....	5
2.2.3 Блокировка передних колес.....	5
2.2.4 Регулировка тазово-поясничного стабилизатора.....	5
2.2.5 Положение ребенка в ходунках.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10185 (высота 47-64 см, высота 59-78 см). Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10185 предназначены для обучения ходьбе пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Высота 47-64 см (под рост
100-130 см)



Высота 59-78 см (под рост
130-170 см)

1.2 Технические характеристики:

- Складная рама;
- Материал: алюминий с цветным напылением;
- Передние колеса с фиксацией поворотного механизма, размер колес - 5";
- Задние колеса с храповым механизмом, размер колес - 3";

- Производство: Тайвань (Китай);
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, тазово-поясничный стабилизатор со страховочными ремнями в комплекте с крепежными винтами, руководство по эксплуатации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Важные предупреждения:

- Перед каждым использованием проверяйте изделие.
- Убедитесь, что все кнопки-фиксаторы выскочили из отверстий.
- Следует протирать изделие мягким моющим средством и водой, затем высушить.
- Максимальная нагрузка - 63 кг

2.2 Порядок работы:

2.2.1. Сборка изделия

А. Вытащите изделие из упаковки.

Б. Соберите изделие, вставляя колеса в отверстия ножек, согласно написанным на них цифрам, до характерного щелчка.

В. Чтобы раскрыть ходунки, необходимо положить их на пол большими колесами вниз. Потяните на себя задние ножки с маленькими колесиками, слегка придерживая большие колеса, до характерного щелчка. Кнопки-фиксаторы, расположенные на боковых перекладинах, должны зафиксировать ходунки в разобранном состоянии.

(Чтобы сложить опоры-ходунки нажмите на кнопки-фиксаторы, приподнимите ходунки, чтобы упор был на задние ножки (с маленькими колесами) и опустите передние ножки к задним.)


Г. Закрепите тазово-поясничный стабилизатор на раме ходунков с помощью крепежных винтов.

2.2.2 Блокировка задних колес

Чтобы во время пользования ходунками ребенок не мог передвигать ходунки назад, маленькие колесики можно заблокировать, опустив храповый механизм. Соответственно, чтобы снять блокировку колесиков - поднять храповый механизм.

2.2.3 Блокировка передних колес

Передние колеса также можно зафиксировать в одном положении, чтобы ребенок мог двигаться только вперед. Для этого необходимо развернуть колеса таким образом, чтобы фиксирующие поворотные механизмы были повернуты друг к другу и против часовой стрелке поднять вверх до упора. Чтобы снять блокировку - достаточно опустить механизм вниз. (см рис.1)

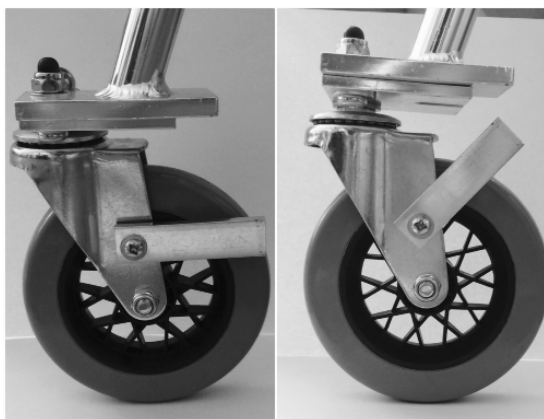

2.2.4 Регулировка тазово-поясничного стабилизатора

Чтобы отрегулировать ширину тазово-поясничного стабилизатора, необходимо ослабить фиксирующие винты и раздвинуть (или наоборот задвинуть) боковые фиксаторы до необходимой ширины и затянуть фиксирующие винты.

2.2.5 Положение ребенка в ходунках

Поставьте ребенка спиной к тазово-поясничному стабилизатору таким образом, чтобы задняя подушка была в области поясницы, зафиксируйте по ширине боковые фиксаторы и застегните ремень. Если задняя подушка стабилизатора находится ниже поясницы или выше, и ребенку неудобно, то необходимо отрегулировать ходунки по высоте с помощью кнопок-фиксаторов, расположенных на передних и задних ножках с колесами.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку всех деталей каркаса необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание повреждений поверхностей, затем высушить.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки 10185

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru



Для заметок