


ИНСТУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

GMON 1000Pro

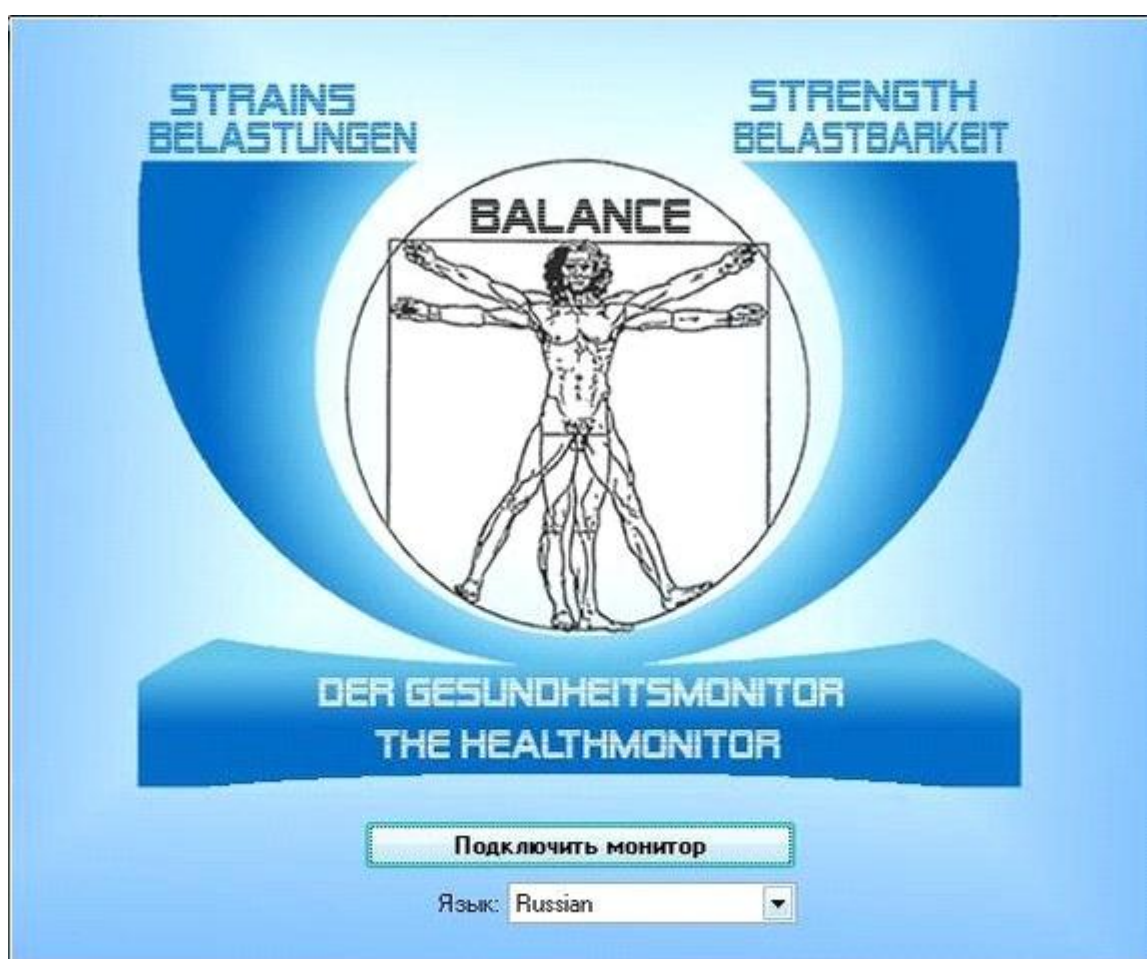


1. Вставляем установочный диск GMON в дисковод.


Программа автоматически запускается. Если программа не запустилась, переходим на просмотр диска в дисковом

(Пуск->Компьютер)


Заходим в меню программы на диске.

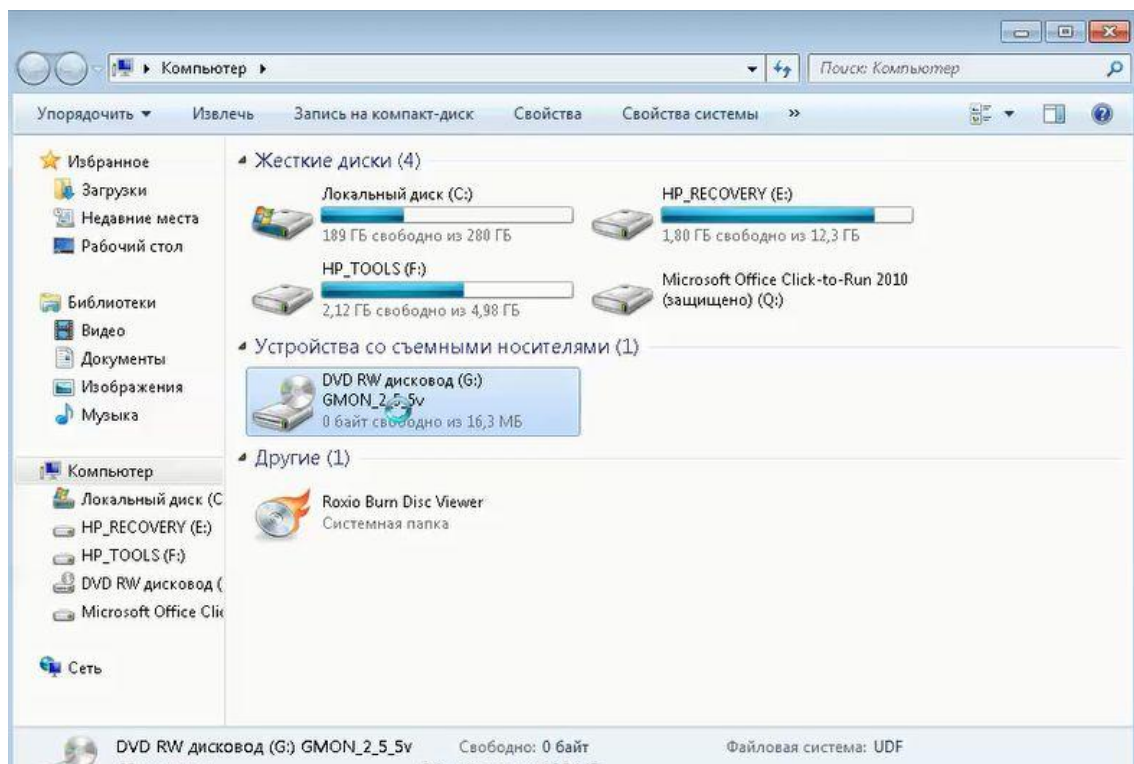


2. Запускаем установочный файл «Setup»

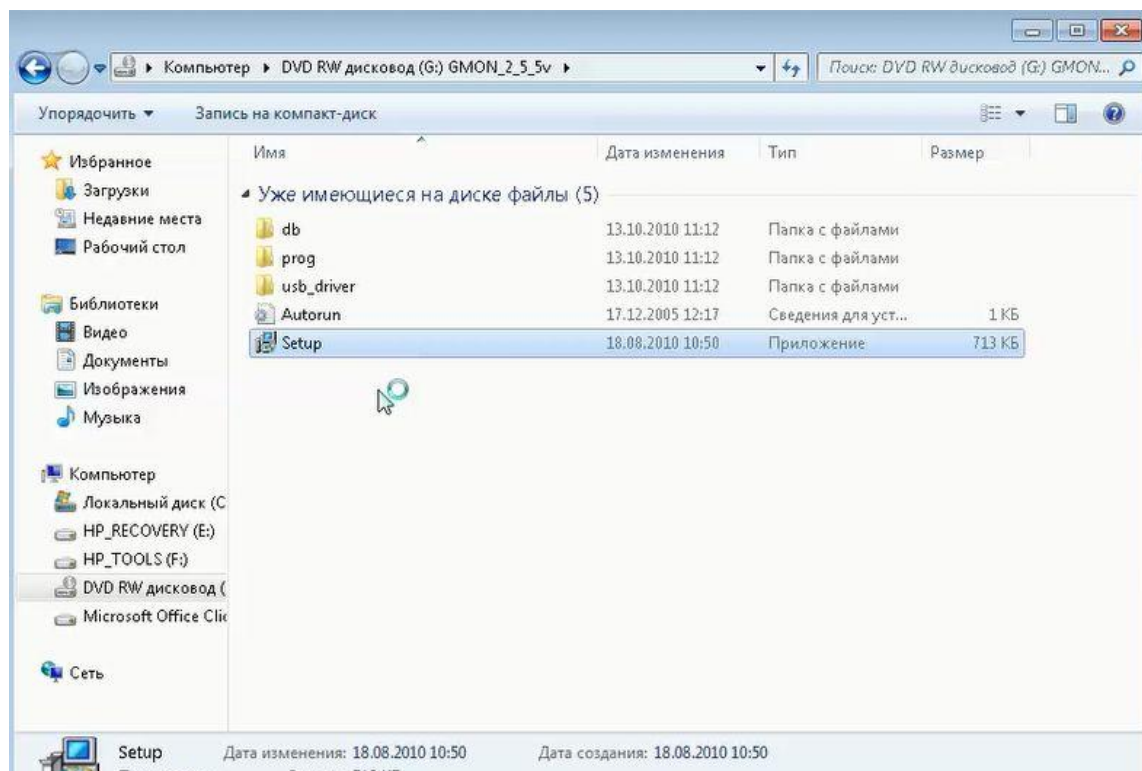


3. Подтверждаем запуск установки программы.

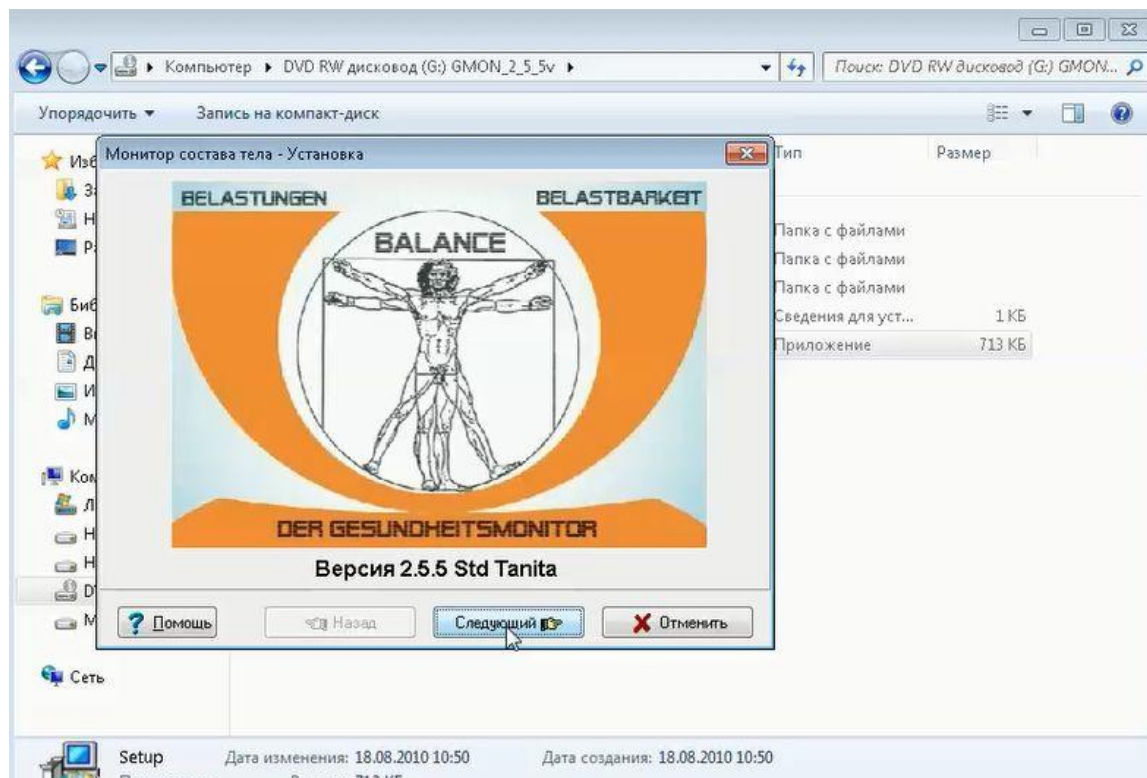

4. Принимаем соглашение.

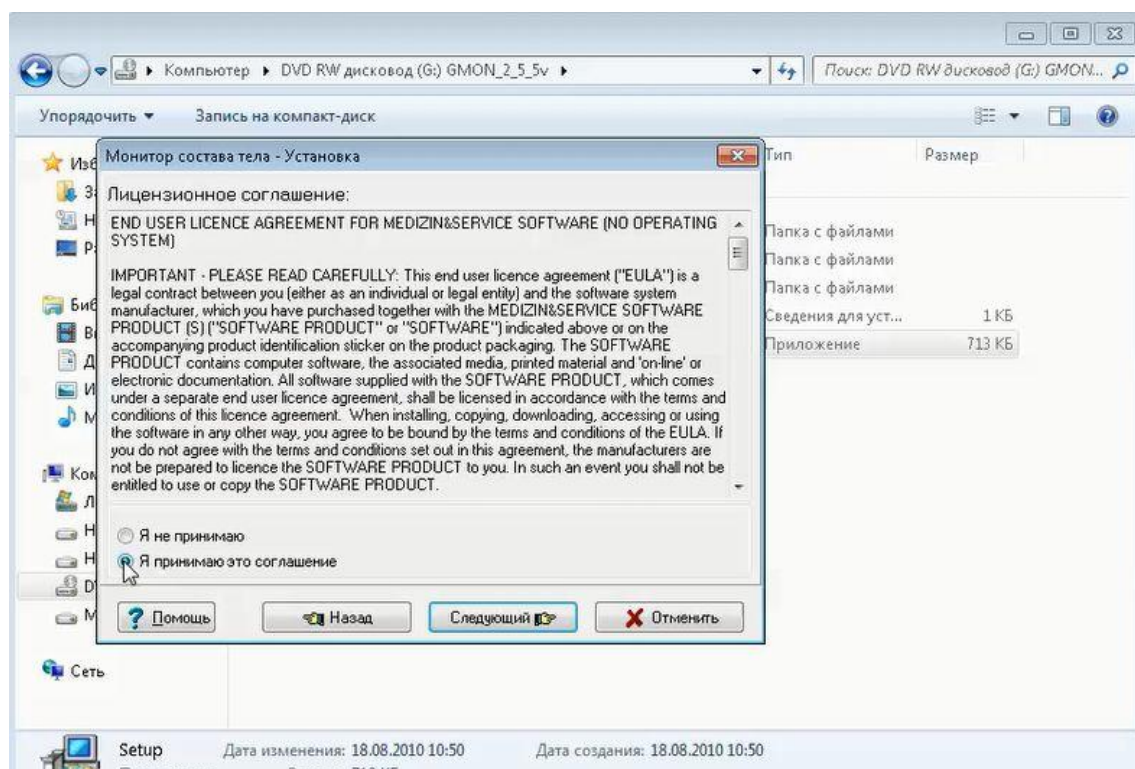


Переходим к следующему шагу установки

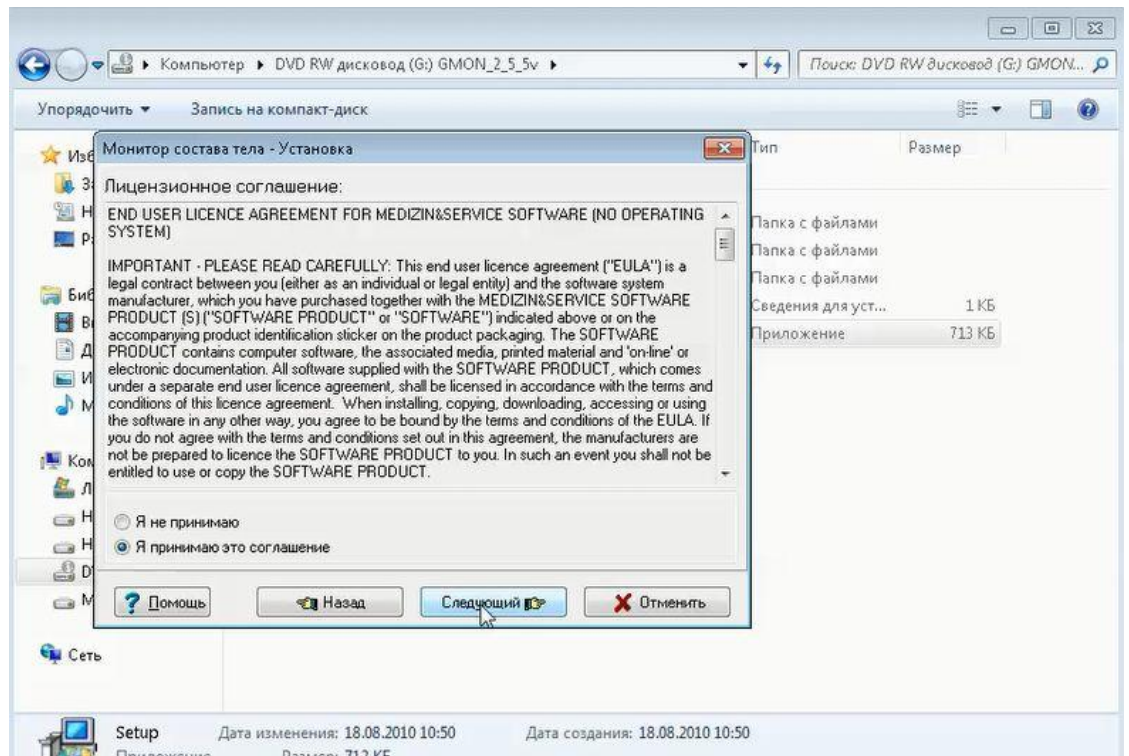


5. Выбираем один из вариантов запуска программы после установки.

Рекомендуется «Вход в меню для всех пользователей и значок на рабочем столе»

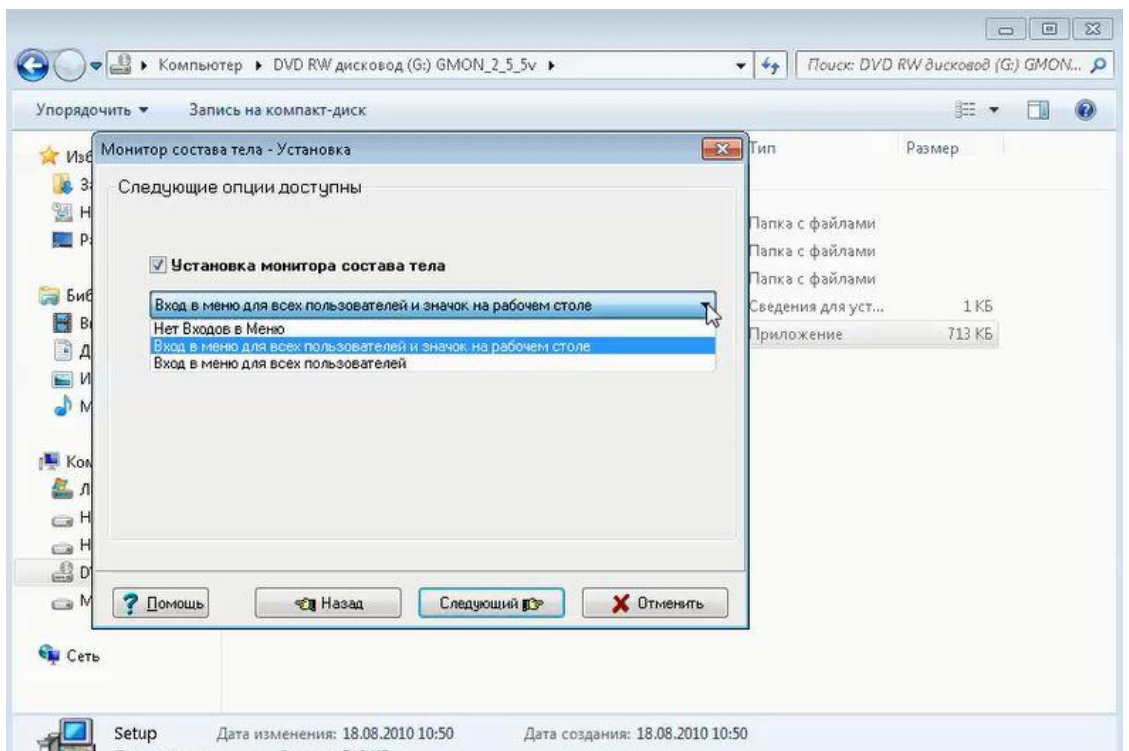


Подтверждаем наш выбор и переходим к следующему шагу.

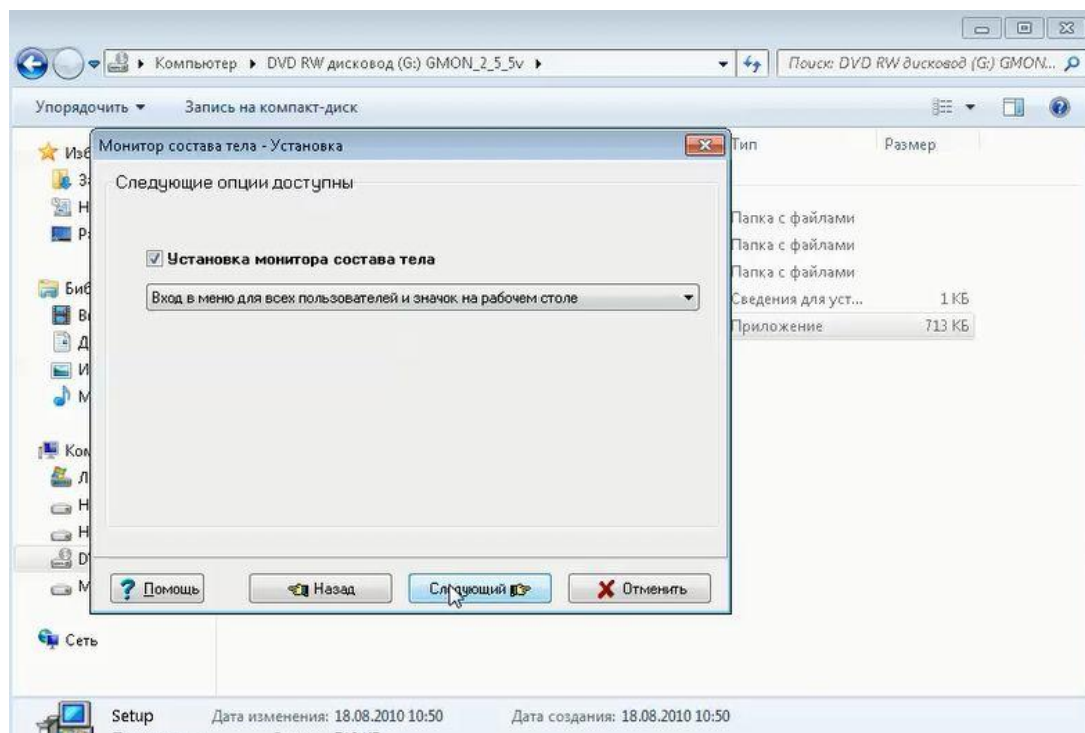


6. Вводим серийный номер и номер лицензии программы и подтверждаем их переходом к следующему шагу установки.


Серийный номер и номер лицензии прописаны на внутренней стороне обложки в пластиковой коробке диска.

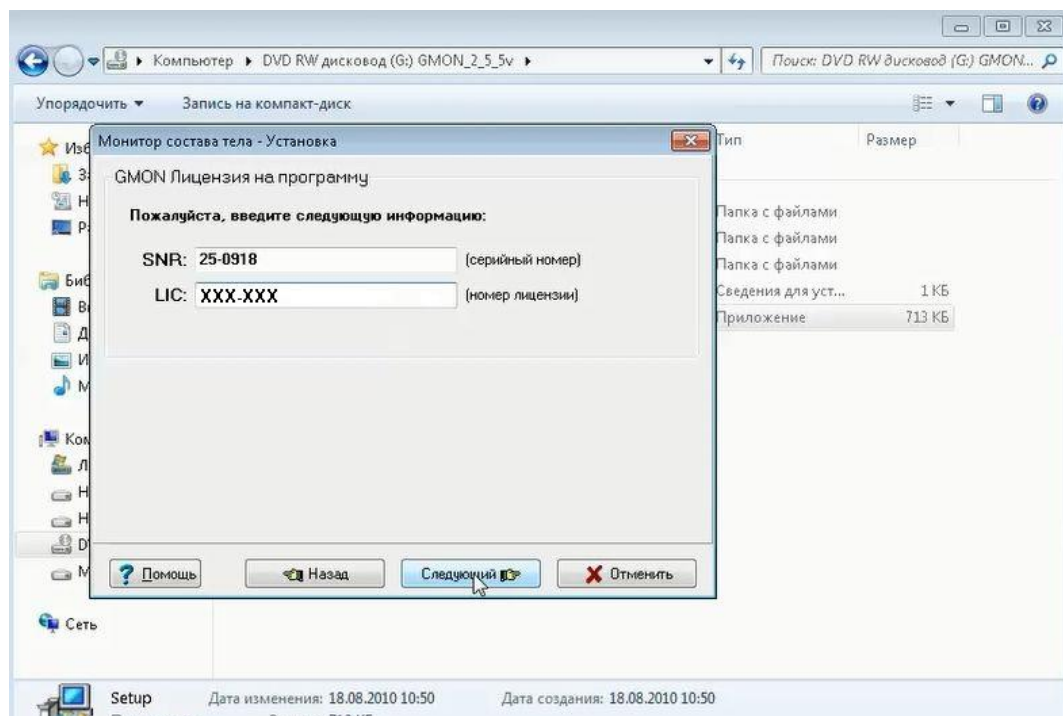


7. Нажимаем на «Установка».

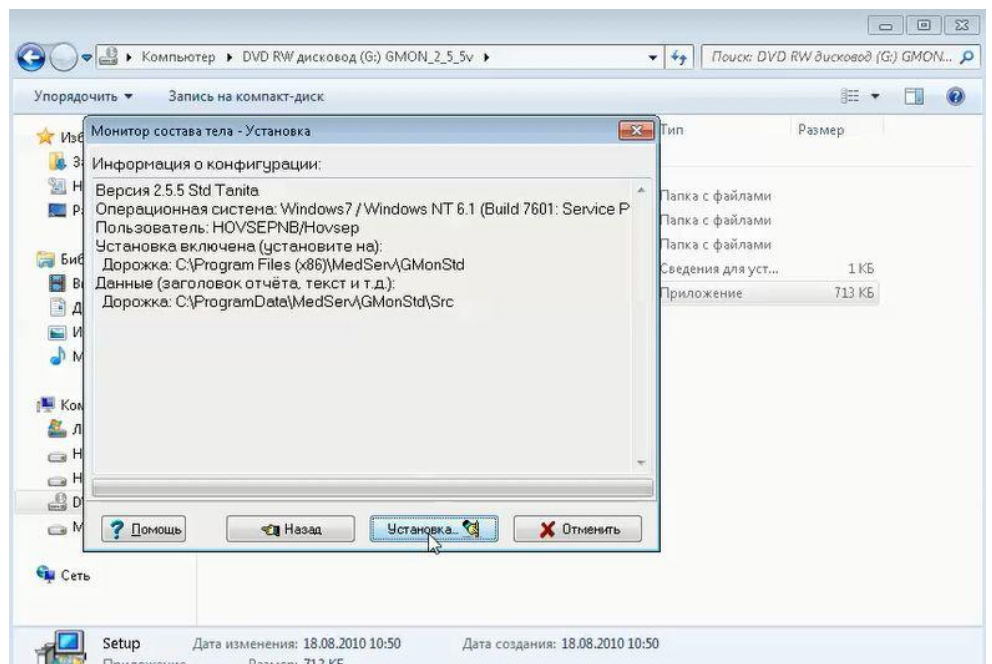

Начинается установка программы GMON.

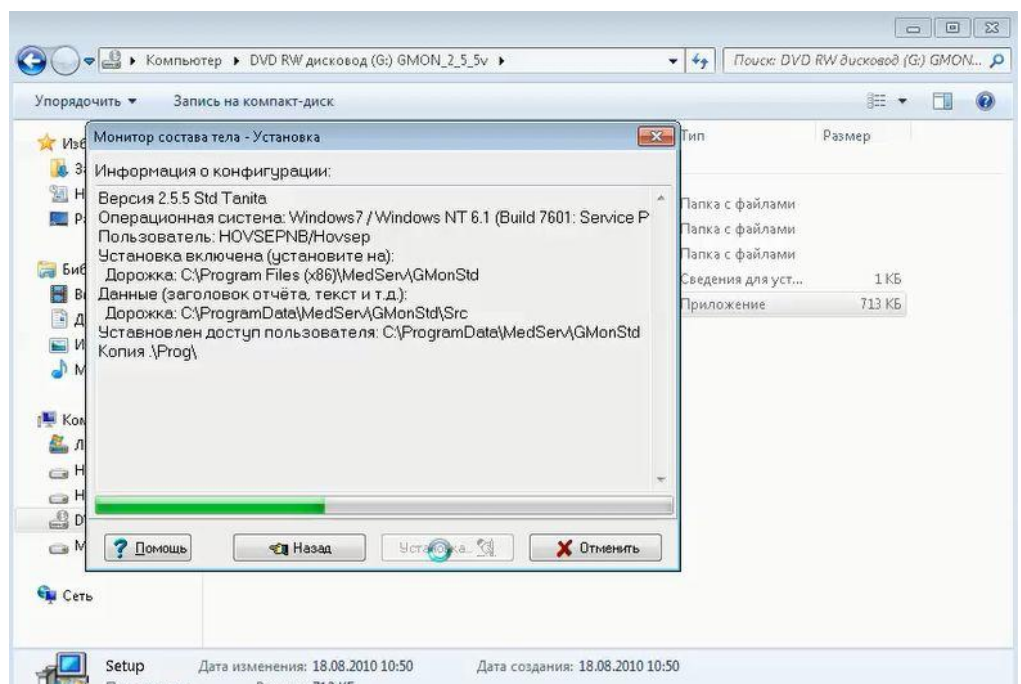


Установка успешно завершена.

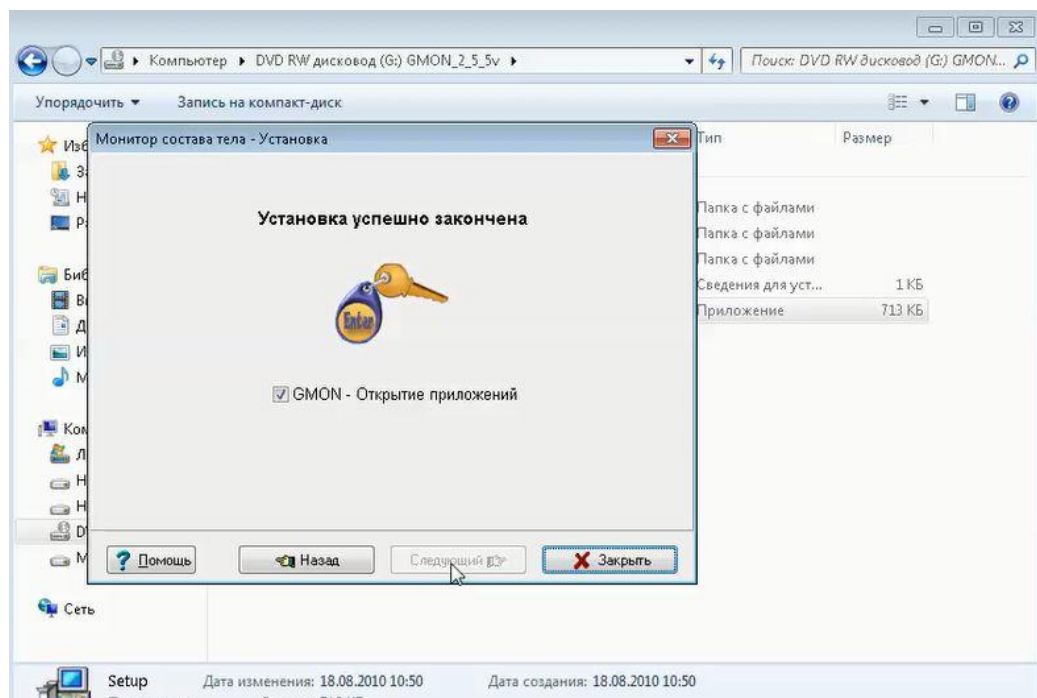

8. Закрываем окно установки.

На рабочем столе появляется иконка запуска программы GMON.

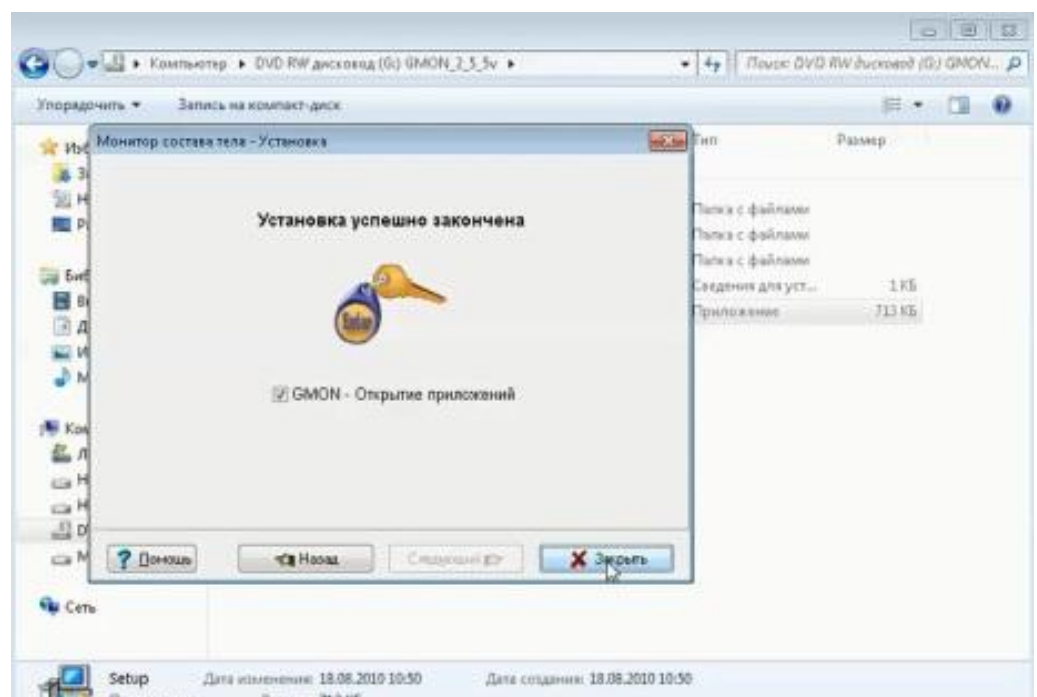

9. Переходим на сайт разработчика.

www.gmon.info/support

ВНИМАНИЕ

Без перехода на сайт разработчика, регистрации и получения возможных обновлений программа не будет работать

Для получения обновления необходимо перейти по ссылке на сайт разработчика.

www.gmon.info/support



10. Нажимаем на “Update” (Обновление)



Открывается страница для регистрации.

GMON Health Monitor / Medizin & Service GmbH

INDICATE Health Risks
RATE professionally
REACT prophylactical

english version
deutsche Version

GMON Navigation

- News
- Update
- Manual
- Shopping
- Demo
- Questions & Answers
- Medizin&Service GmbH

Notice:

You can find the SNR and LIC inside the program cd's casing. Hereby we confirm, that your personal data will not be given to any third party. With this registration you receive an automatically created confirmation of receipt and after validation of the licence information an answer mail will be sent to you with informations about available updates of our Health Monitor. After that no further mail with advertising content will be sent.

Your e-mail address:

Your name:

Your company:

Serial number (SNR):

Licence key (LIC):

GO

11. Заполняем пустые поля.

-Адрес электронной почты, на которую вышлют обновление.

- Имя

- Серийный номер(SNR)

- Номер лицензии(LIC)

Регистрацию заканчиваем нажатием на «GO»

GMON Health Monitor / Medizin & Service GmbH

INDICATE Health Risks
RATE professionally
REACT prophylactical

english version
deutsche Version

GMON Navigation

- News
- Update
- Manual
- Shopping
- Demo
- Questions & Answers
- Medizin&Service GmbH

Notice:

You can find the SNR and LIC inside the program cd's casing. Hereby we confirm, that your personal data will not be given to any third party. With this registration you receive an automatically created confirmation of receipt and after validation of the licence information an answer mail will be sent to you with informations about available updates of our Health Monitor. After that no further mail with advertising content will be sent.

Your e-mail address:

Your name:

Your company:

Serial number (SNR):

Licence key (LIC):

GO

В ближайшие несколько минут, на ваш Email приходит сообщение с подтверждением о регистрации.

Ждем второе письмо с инструкциями по установке. Это может занять от 3 мин до 3 рабочих дней.

Обычно второе письмо приходит через 15-30 мин.

Тема: GMON Produktregistrierung/ -update

Thanks for your registration. It will be processed under **TAN number 000002358** within the **next three work days**. You will receive an answer mail with information about available updates for the Health Monitor. If you don't receive our answer E-Mail due to technical reasons (SPAM filter etc.), please send a message including the TAN number to support@gmon.info.

Best regards

Medizin & Service GmbH
Chemnitz / Sachsen
www.medizinservice-sachsen.de

Notice:
This email was generated automatically.
If you have any questions, please send a mail to support@gmon.info

-----перевод-----

Спасибо за регистрацию, ваш регистрационный номер **000002658**.

В течении трех рабочих дней Вы получите ответ о доступных обновлениях.

Если по техническим причинам (SPAM-фильтр и т.д.) на ваш электронный адрес вы не получите инструкций, пожалуйста отправьте сообщение с вашим регистрационным номером на support@gmon.info.

Второе письмо содержит информацию о возможных обновлениях и советов по обновлению.

Тема: Re: GMON Update

Большое спасибо за регистрацию:
Product: Health Monitor
Name: **Ivan**
Firm/Practice:
E-Mail: **ivanov@mail.ru**
SNR: **25-0918**
Transaction-Code: **000002358**

Вы можете установить версию 2.7.8, скачав ее по ссылке:
http://www.gmon.info/download/*****/TanitaStandard278_drt.exe
(Объем файла: 7.2MB, доступен для скачивания 8 дней)

Советы по обновлению:
- Нажмите на верхнюю ссылку или скопируйте ее в адресную строку вашего браузера.
- Загрузите установочный файл и запустите его,
- Следуйте инструкциям, появляющимся во время установки.

Требования:
- Для того, чтобы обновление произошло, необходимо, чтобы на вашем компьютере уже была установлена старая версия GMON COS std. с серийным номером, который вы выслали при регистрации (в данном случае это **25-0918**).

При возникновении вопросов и проблем, обращайтесь на support@gmon.info

** История обновлений **
http://www.gmon.info/changes_en.html

** Поддержка / FAQ **
<http://www.gmon.info/support>

Разработчик ПО

Medizin & Service GmbH
Chemnitz / Sachsen / Germany
www.medizinservice-sachsen.de

12. Нажмите на ссылку как показано справа или скопируйте ее в адресную строку вашего браузера.

Автоматически загрузится установочная программ.

Тема: Re: GMON Update

Большое спасибо за регистрацию:
Product: Health Monitor
Name: **Ivan**
Firm/Practice:
E-Mail: **ivanov@mail.ru**
SNR: **25-0918**
Transaction-Code: **000002358**

Вы можете установить версию 2.7.8, скачав ее по ссылке:
http://www.gmon.info/download/*****/TanitaStandard278_drt.exe
(Объем файла: 7.2MB, доступен для скачивания 8 дней)

Советы по обновлению:
- Нажмите на http://www.gmon.info/download/*****/TanitaStandard278_drt.exe в адресную строку вашего браузера.
- Загрузите установочный файл и запустите его,
- Следуйте инструкциям, появляющимся во время установки.

Требования:
- Для того, чтобы обновление произошло, необходимо, чтобы на вашем компьютере уже была установлена старая версия GMON COS std. с серийным номером, который вы выслали при регистрации (в данном случае это **25-0918**).

При возникновении вопросов и проблем, обращайтесь на support@gmon.info

** История обновлений **
http://www.gmon.info/changes_en.html

** Поддержка / FAQ **
<http://www.gmon.info/support>



Разработчик ПО

Medizin & Service GmbH
Chemnitz / Sachsen / Germany
www.medizinservice-sachsen.de

ВНИМАНИЕ

Установочная программа сгенерирована под вашу программу GMON и только для него, с его номером лицензии и серийным номером.

13. Запустите установочную программу.

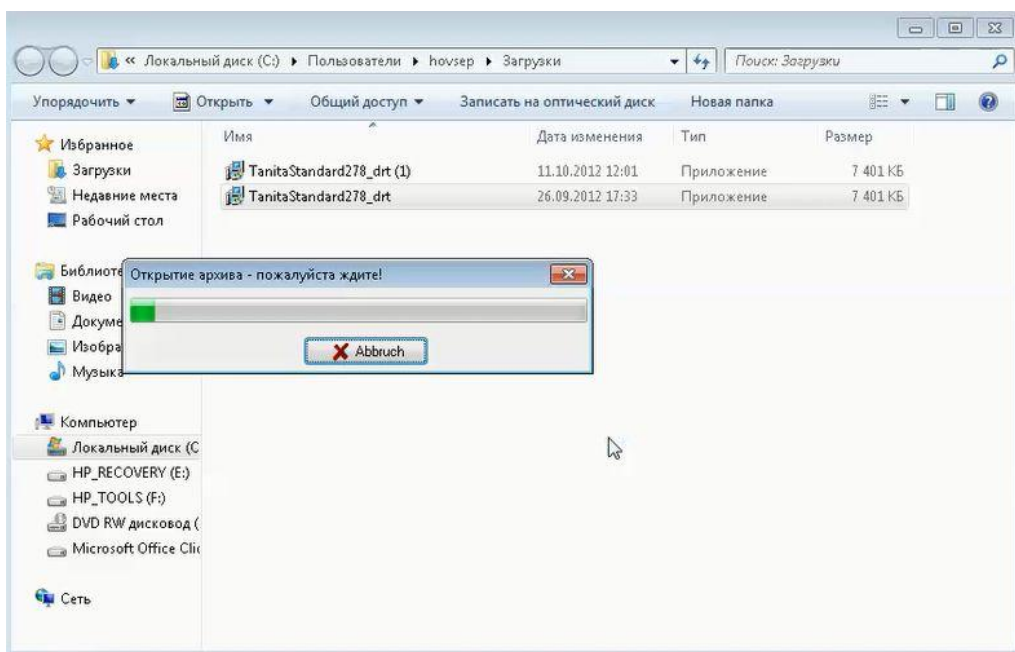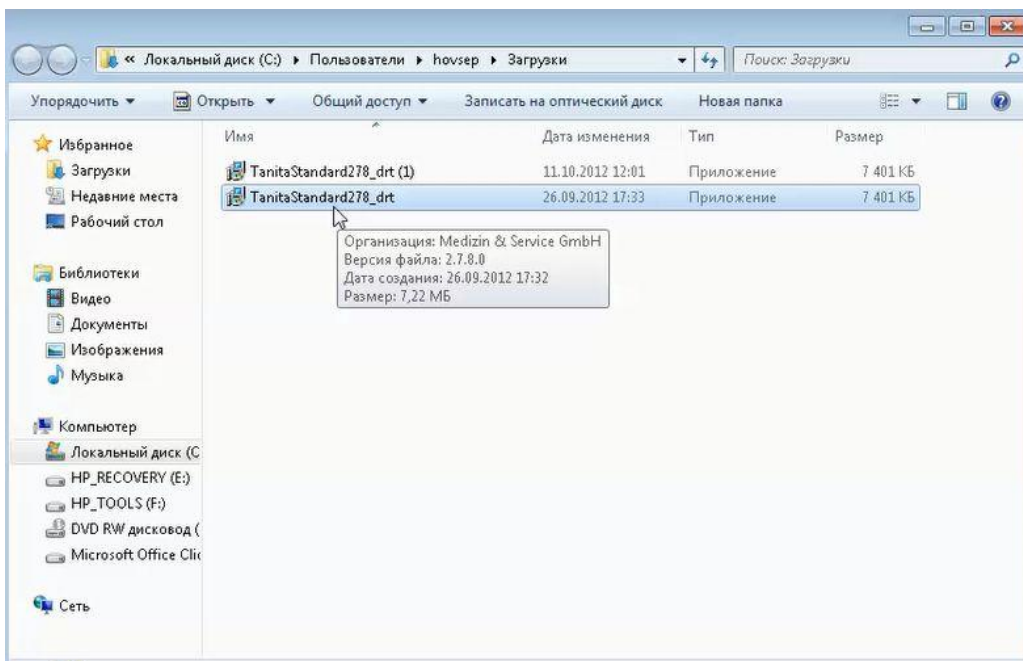

14. Будет необходимо проделать шаги идентичные пунктам с 3-го по 8-ой.



Программа установлена, иконка для запуска находится на рабочем столе



Инструкция по установке драйверов беспроводного передатчика ANT USBStick.

Вставьте USB Stick в порт компьютера.

Новое оборудование будет распознано и начнется автоматическая установка драйверов.

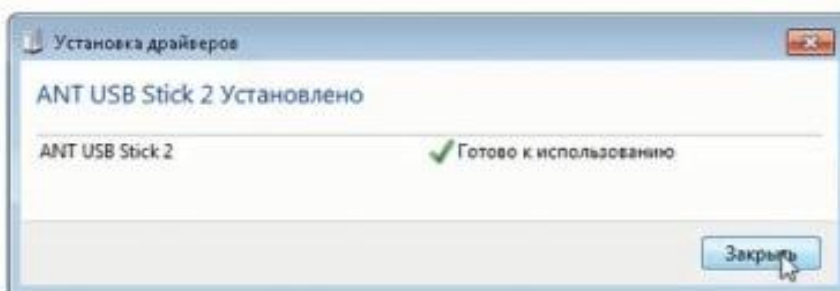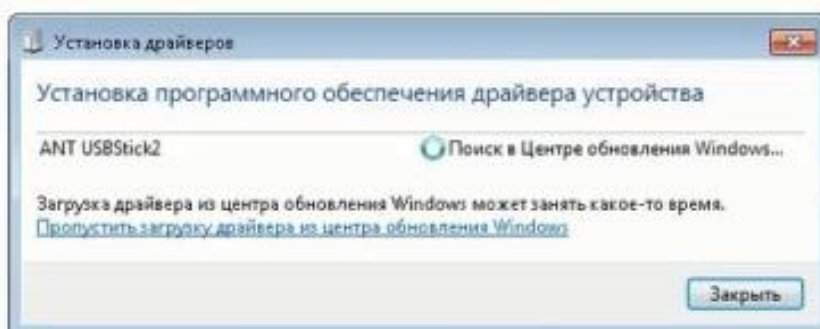

ANT USBStick готов к работе