

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  
(С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФИКСИРУЮЩИМИ РЕМНЯМИ)**

**LAB-221**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Ортез Orlett на голеностопный сустав (с дополнительными фиксирующими ремнями), арт. LAB-221, стабилизирует голеностопный сустав. Осуществляет фиксацию области лодыжек, голеностопного сустава, суставов предплюсны, способствует уменьшению отёчности в области голеностопного сустава и стопы. Дополнительные фиксирующие ремни и спиральные ребра жесткости ограничивают инверсию/эверсию голеностопного сустава, оставляя свободными движения в сагиттальной плоскости (сгибание-разгибание). Шнуровка ортеза позволяет регулировать давление на мягкие ткани в области сустава. Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- функциональная иммобилизация при лечении повреждений связок голеностопного сустава;
- реабилитация после переломов голеностопного сустава;
- реабилитация после травм и операций на капсульно-связочном аппарате голеностопного сустава;
- остаточная нестабильность голеностопного сустава;
- артроз с нестабильностью голеностопного сустава;
- профилактика вторичных травм голеностопного сустава.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВПОКАЗАНИЯ**

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения ортеза необходима консультация лечащего врача.

Людам с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

## КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рис. 1 и 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Муфта из неэластичной прочной сетки.
2. Шесть съемных спиральных ребер жесткости (по 3 с каждой стороны).
3. Шнуровка.
4. Два фиксирующих ремня.



рис. 1



рис. 2



рис. 3

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Расстегните ремни и развяжите шнуровку.
2. Поместите ногу в ортез и зашнуруйте его, как ботинок (рис. 2).
3. Зафиксируйте ремни: сначала протяните ремень с внешней (латеральной) стороны через подъем на внутреннюю (медиальную) сторону, далее через стопу и зафиксируйте ремень на внешней стороне ортеза с помощью застежки-липучки велкро (рис. 2). Аналогичным образом зафиксируйте внутренний ремень на внутренней стороне ортеза на уровне лодыжки (рис. 3). По рекомендации лечащего врача необходимо менять натяжение фиксирующих ремней, регулируя нагрузку на голеностопный сустав.

## ВНИМАНИЕ!

Не следует слишком сильно затягивать шнуровку во избежание нарушений кровообращения.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора ортезов Orlett на голеностопный сустав необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность подъема стопы.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett, арт. LAB-221, по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL
Окружность подъема стопы, см	26-29	29-32	32-35	35-38

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **СОСТАВ**

60% полиэстер, 20% полиамид, 5% хлопок, 12% сталь, 3% поливинилхлорид.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. LAB-221, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



