



**Костыли подмышечные  
10021, 10021/СН, 10021/У, 10022,  
10022ВА, 10022/У, 10023, 10023ВА,  
10023/У**



**Насадки для костылей  
Резиновая насадка для костылей:  
10030, 10031**

**Руководство по эксплуатации**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей подмышечных 10021, 10021/CH, 10021/U, 10022, 10022BA, 10022/U, 10023, 10023BA, 10023/U. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

### 1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	10021, 10021/CH, 10021/U, 10022, 10022/U, 10023, 10023/U
	сталь	10022BA, 10023BA
рукоятка	регулируемая по высоте	все модели
валики	мягкие, регулируемые по высоте	все модели
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

### 1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

## 2. использование по назначению

## 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыли 10022ВА и 10023ВА - 225 кг; на оставшиеся модели - 113 кг.

## 2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.

2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

Модели 10021/U, 10022/U, 10023/U - со встроенным УПС.

## 3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

#### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

Костыли подмышечные 10021, 10021/СН, 10021/У, 10022, 10022/У, 10023, 10023ВА, 10023/У.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\* \*Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

# Приложение 1

1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

**Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве**

**Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012**

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер ИНН 7734197385)

**125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6**

**тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru**

(адрес, телефон, факс)

в лице

**Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что

1. Костыли подмышечные: АРТ. 10021, АРТ. 10021/СН, АРТ. 10021/Р, АРТ. 10021/У, АРТ. 10022, АРТ. 10022/У, АРТ. 10022-ВА, АРТ. 10023, АРТ. 10023/У, АРТ. 10023-ВА;
2. Костыли локтевые: АРТ. 10071, АРТ. 10072, АРТ. 10073, АРТ. 10074, АРТ. 10074/У, АРТ. 10075, АРТ. 10075/У, АРТ. 10076, АРТ. 10076/У, АРТ. 10079, АРТ. 10079/У, АРТ. 10081;
3. Принадлежности к костылям: АРТ. 10050 - Резиновые подмышечные валики 19 см., АРТ. 10060 - Резиновые валики для кисти 10 см., АРТ. 10030 - Резиновая насадка для костылей АРТ. 10031 - Резиновая насадка для костылей, АРТ. 10032 - Резиновая насадка для костылей, АРТ. 10033 - Резиновая насадка для костылей.

**Изготовитель продукции:** VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД),

8TH FLOOR, NO 149, SEC. 2, TA TUNG RD. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай), заводы:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS Co. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (Китай)

- ST. YORK ENTERPRISE Co., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (Китай)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS Co. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (Китай)

**Код ОК 005 (ОКП) 93 9670 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0**

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

**Серийный выпуск**

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

**ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010, ГОСТ Р 51632-2000,**

**соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011**

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

**Декларация принята на основании**

**протоколов испытаний: №№ 1688.014, 1687.014 от 19.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России**

**(№ РОСС RU.0001.21ИМ33);**

**№№ 1128/14, 1129/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)**

**регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09872 от 21.06.2011**

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации **16.05.2014** Декларация о соответствии действительна до **15.05.2019**



М.П.

(Подпись)

**С.П.Бадалян**

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)**

**Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.**

**141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29**

**Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru**

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

**№ РОСС ТМ.МЕ77.Д00350 от 16.05.2014**

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(Подпись)

**Д.А.Дружинин**

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок