

МЕТ ТВ-40

Тележка для перевозки больных

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

Введение

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1. Технические характеристики

Габариты изделия (с ручкой и поднятыми ограждениями)	201 x 74 см
Габариты ложа	198 x 63 см
Высота ложа	61 – 91 см
Угол наклона спинной секции	0 - 75°
Размер матраса	186 * 60 * 8 см
Диаметр колесных опор	200 мм
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	160 кг

2. Изделие в деталях



- 1 – Ножная секция ложа
- 2 – Спинная секция ложа
- 3 – Боковые ограждения

- 4 – Фиксатор положения спинной секции
- 5 – Ручка привода регулировки высоты
- 6 – Держатель для кислородного баллона

7 – Колёсное основание

9 – Колеса

8 – Пятое колесо

10 – Педали системы блокировки колес

3. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не попадут под колеса или в конструкцию изделия.

В процессе эксплуатации изделия:

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- по окончании регулировок приводите ручку винтового привода регулировки высоты в сложенное положение, чтобы избежать поломок и травм;
- во время регулировок изделия, колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!



При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

4. Техническое обслуживание и уход

- 4.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения, и смазывайте подвижные части.
- 4.2. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или поломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.
- 4.3. Для очистки пользуйтесь мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Допускается использование любых чистящим средствам на водной основе. Не допускается применение абразивных материалов и едких веществ. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
- 4.4. После очистки и дезинфекции протирайте изделие насухо.



Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- 5.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5 °С до +40 °С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

6. Комплектация

- Тележка для перевозки больных – 1 шт.
- Матрац толщиной 8 см – 1 шт.
- Ремень на липучке для фиксации пациента – 2 шт.

7. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Информация о производителе, месте производства и гарантийном обслуживании:

*Тележка для перевозки больных МЕТ ТВ-40 с принадлежностями:
регистрационное удостоверение РЗН 2021/16073 от 17 декабря 2021 года;*

*Сервисный центр: ООО «МЕТ»
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.
Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, +7 (903) 775 15 51*