



# Опоры-ходунки 10181

Руководство по эксплуатации



## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10181. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10181 предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.

Если вы чувствуете затруднение при поднятии ходунка, вы можете заменить нижнюю часть ножек колесами.

### 1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	алюминий
шаг регулировки высоты, см	2,5
расстояние между поручнями, см	53
регулировка по высоте, см	75-93
фиксирующий замок	двойной
вес, кг	3,56
габариты, см	13x56x41
макс. нагрузка, кг	135
гарантия	6 мес.

### 1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, пара съемных колес, пара лыж, руководство по эксплуатации.



## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должно превышать 135 кг.

### 2.2 Порядок работы

1. Вытащите изделие из коробки
2. Раскройте верхнюю часть ходунка, сначала одну сторону, затем другую
3. Ножки ходунков автоматически вставятся в раму ходунков, так как ножки и рама соединены резиновым тросом.
4. При необходимости 1 пару ножек ходунков можно заменить на 1 пару ножек с колесами (идут в комплекте). Для этого необходимо вытащить ножку ходунков, нажав на медный шарик. Взять ножку ходунков с колесом, нажать на медный шарик и вставить в раму ходунков, затем отрегулировать нужную высоту. Убедитесь, что медный шарик полностью выскочил из отверстия.
5. Две Насадки на ножки можно заменить на «лыжи» (идут в комплекте). Для этого необходимо снять насадки и вставить «лыжи».

### 3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Опоры-ходунки 10181

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Приложение 1

1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)  
ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новоселовская, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет,

что

ОПОРЫ-ХОДУНКИ: АРТ. 10180 (ВЫСОТА 66-81 СМ.; ВЫСОТА 80-95 СМ.), АРТ. 10180-3W, АРТ. 10180-W, АРТ. 10181, АРТ. 10184HR, АРТ. 10184, АРТ. 10185 (ВЫСОТА 47-64 СМ.; ВЫСОТА 59-78 СМ.), АРТ. 10185-BA, АРТ. 10188 (ВЫСОТА 65-82 СМ.; ВЫСОТА 82-94 СМ.), АРТ. 10189, АРТ. ROLL DUO, АРТ. ROLL TRIO, АРТ. ROLL QUATTRO, АРТ. ROLL PUSH, АРТ. ROLL EURO, АРТ. QUICK, АРТ. SMART,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ: АРТ. 10020 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10038 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10173 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10174 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10175 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10176 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10177 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10178 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ С ПОВОРОТОМ НА 360, АРТ. 10179 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ МОДЕЛЕЙ (10184, 10185)

**Изготовитель продукции:** VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД), 8TH FLOOR, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай), ЗАВОДЫ:  
- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT, DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

- Shanghai Xinde Hardware Factory, Beiguan Village, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 94 5150 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

### Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, ревизия договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р 51632-2000,

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)  
Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1739.014, 1687.014 от 21.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№ 1124/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09870 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 16.05.2014 Декларация о соответствии действительна до 15.05.2019



С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС ТW.МЕ77.Д00351 от 16.05.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок