



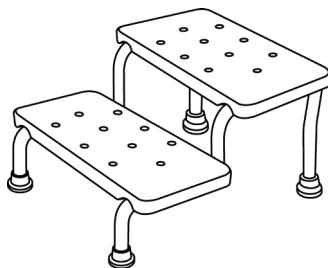

Двухуровневая вспомогательная ступенька 10223

Двухуровневая вспомогательная ступенька с ручкой 10223 Н

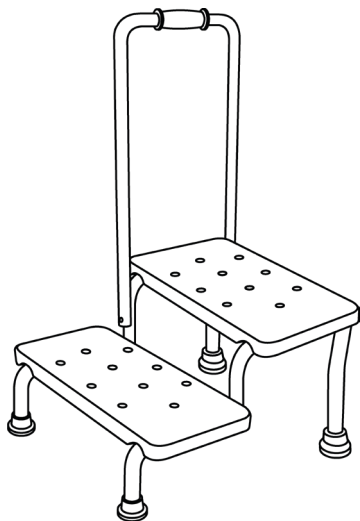

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	3
1.1 Назначение _____	3
1.2 Технические характеристики _____	3
1.3 Упаковка _____	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	4
2.1 Важные предупреждения _____	4
2.2 Порядок работы _____	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки 10223 и вспомогательной ступеньки с ручкой 10223 Н.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Данные изделия предназначены для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

1.2 Технические характеристики

Характеристики	10223	10223 Н
материал	алюминий, пластик	алюминий, пластик
высота (см)	31	93
ширина (см)	41	41
глубина (см)	55	55
вес изделия (кг)	2,7	3

1.3 Упаковка

Комплектация 10223:

- Двухуровневая ножка – 2 шт.
- Поверхность ступеньки – 2 шт.
- Соединительные балки - 4 шт.
- Винт барашковый с шайбой – 16 шт.

Комплектация 10223 Н:

- Двухуровневая ножка – 2 шт.
- Поверхность ступеньки – 2 шт.
- Соединительные балки - 4 шт.
- Винт барашковый с шайбой – 18 шт.
- Ручка для ступеньки – 1 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин.
- Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку. Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

2.2 Порядок работы:

Прежде чем приступить к использованию необходимо произвести сборку:

Для 10223

- Расположите комплектующие на ровной и чистой поверхности.
- Совместите две двухуровневые ножки с помощью соединительных балок, совмещая отверстия на ножках и балках.
- Закрепите конструкцию с помощью барашковых винтов с шайбой, вкручивая в отверстия.
- Закрепите поверхности ступенек с помощью барашковых винтов с шайбой.

Для 10223 Н

- Расположите комплектующие на ровной и чистой поверхности.
- Совместите две двухуровневые ножки с помощью соединительных балок, совмещая отверстия на ножках и балках.
- Закрепите конструкцию с помощью барашковых винтов с шайбой, вкручивая в отверстия.
- Закрепите поверхности ступенек с помощью барашковых винтов с шайбой.
- Поставьте ступеньку на ножки.
- Совместите ручку с ножками и закрепите с помощью барашковых винтов собоих сторон.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные

дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька 10223

Вспомогательная ступенька с ручкой 10223 Н

Производитель: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

