

## Тест-полоски ONE TOUCH

### Форма выпуска

Тест-полоски.

### Упаковка и состав

25 шт в тубе. В упаковке 2 тубы.

### Меры предосторожности

Не использовать после истечения срока годности, может показывать не правильный результат.

### Особенности

Нельзя использовать через 6 месяцев после вскрытия тубуса.

Флакон или крышка содержат поглотитель влаги.

Крышку закрывать немедленно после извлечения тест-полоски из флакона.

Храните флакон с тест-полосками в сухом прохладном месте при температуре не выше 30°C. Не допускайте воздействия прямого солнечного света и тепла. Не храните в холодильнике.

Храните тест-полоски исключительно в оригинальном футляре, не перекладывайте их в другой футляр или контейнер.

Вынув из футляра одну полоску OneTouch Ultra, немедленно плотно закройте крышку.

Используйте полоску сразу после того, как вы вынули ее из футляра.

Как только вы открыли упаковку, пометьте на этикетке срок годности. Через шесть месяцев после того, как вы открыли футляр, следует выбросить неиспользованные тест-полоски.

Не допускайте попадания грязи или крови на верхний белый край полоски.

Не используйте полоски после истечения указанного на упаковке срока годности.

Не сгибайте, не разрезайте на части и не проделывайте никаких других манипуляций с тест-полосками OneTouch Ultra.

### Хранение

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, в сухом прохладном месте при температуре, не превышающей 30°C. Не замораживать.

Хранить в местах недоступных для детей.

### Срок годности и использования

См. на упаковке.



