

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровать функциональная медицинская, механическая YG-5

1. Назначение изделия

Кровати функциональные медицинские механические (далее по тексту - кровати) являются новой продукцией, разработанной научными сотрудниками, основываясь на опыте ухода за больными и оказания неотложной помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях интенсивной терапии больниц.

Кровати подходят для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а так же для ухода за больными в домашних условиях.

Характеристика принципа работы кровати

Данная кровать подходит для домов престарелых, домов инвалидов и для домашних условий.

Положение кровати легко можно регулировать для комфорта пациента. Основные преимущества:

- Изголовье кровати из твердого дерева специально подобранной цветовой гаммы, гармоничное сочетание цветов и отделка, вписывающаяся в домашний интерьер;
- Уникальный способ использования подкладного судна, позволяющий больному оставаться в лежачем положении в течение долгого времени и обслуживать себя самостоятельно (только для кроватей с функцией туалета);
- Поверхность кровати легко чистится при помощи электростатического порошка или спрея с антикоррозийным и антибактериальным эффектом.

Особые указания

- Когда вы будете готовы воспользоваться кроватью, убедитесь в том, что Вы внимательно ознакомились с мерами предосторожности, чтобы избежать ненадлежащей эксплуатации и возможных неблагоприятных последствий этого
- Наша компания оставляет за собой право усовершенствовать продукт, менять дизайн и технические характеристики, не выпуская при этом других рекламных материалов на данную серию продукции

Указания по эксплуатации

- Для надлежащего использования внимательно прочтите меры предосторожности
- Нижеприведенные меры предосторожности являются очень важными в целях соблюдения мер безопасности:

Внимание: игнорирование важнейших мер предосторожности увеличивает риск нанесения увечий, несчастных случаев, смерти больного или причинения ущерба имуществу

Внимание: вследствие игнорирования мер предосторожности возможность более эффективного использования кровати снижается

2. Меры предосторожности

- Прежде чем оставить больного на кровати одного без присмотра, поднимите все поручни и приведите в нулевую позицию, чтобы больной не поранился о поручни
- Когда поручни подняты, нужно зафиксировать голову, руки и ноги больного в пределах поручней
- Нагрузка на штатив для внутривенных вливаний не может превышать 7 кг.
- Туалет не должен выходить за границы поддона, в противном случае это может привести к повреждению всей туалетной конструкции

Использовать строго согласно указанным способам эксплуатации

ВАЖНО

- Очищать поверхность кровати при помощи обычных чистящих средств, не использовать химические средства, для дезинфекции и стерилизации использовать бытовые чистящие моющие средства
- Механические подвижные части смазывать каждые шесть месяцев
- Ремонт должен осуществляться только специально обученным персоналом производителя

Установка кровати

1. Затяните гайку болта на двух колесах с тормозом специальным ключом
2. Вставьте болты M10 в четыре отверстия на ножках кровати и в четыре отверстия на основании и затяните их
3. За раскладывающиеся поручни отведите задние части в сторону, затем приведите в соответствие отверстия в основании кровати и затяните болтами M8
4. Установите изголовье кровати, находящееся в подвешенном состоянии, вставив оси в отверстия на каркасе кровати

3. Эксплуатация

1. Спинка, ножная часть

Крутите ручки по часовой стрелке, для спинки на 0-65⁰, для ног - 0-15⁰

2. Опускание спинки, ножной части

Крутите ручки против часовой стрелки

3. Передвижение подкладного судна (только для кроватей с функцией встроенного туалета)

При пользовании функцией туалета слегка передвиньте судно и откройте матрас

4. Закрывание подкладного судна

Не использовать способ против часовой стрелки, при помощи того же способа, что и при передвижении - опустить судно и поднять матрас

Использование судна

Основную часть туалетной конструкции выдвинуть параллельно поддону и вставить сторону паза в слот поддерживающей планки

Использование поручня и штатива для внутривенных вливаний

Поручни с обеих сторон оснащены алюминиевыми ручками, при использовании нажмите и удерживайте кнопки регулировки до тех пор, пока не приведете поручни в конечное положение, после этого они заблокируются автоматически: после использования приведите их в

первоначальное положение, нажав на кнопку регулировки.

Штатив для внутривенных вливаний используется во всех электрических кроватях, у изголовья/изножья кровати расположены два отверстия для установки штатива, отверстия для вливания лекарства находятся на дне основания кровати

4. Технические характеристики:

Характеристика	YG-5
Угол наклона спинки	$0-65^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Угол наклона ножной части	$0-15^{\circ} \pm 3^{\circ}$
Угол подножья	$0-11^{\circ} \pm 3^{\circ}$
Нагрузка, кг	200
Вес изделия, кг	110
Длина, мм	2100
Ширина, мм	950
Высота, мм	470
Матрас	+
Трансфузионная стойка	+
Столик прикроватный	+
Рама для подтягивания	+

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.

5. Обслуживание и ремонт

1. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
2. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
3. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.

6. Транспортировка и хранение

Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

7. Упаковка

Поместите изголовье, изножье и раму кровати в упаковочную сумку, затем в картонную коробку и опечатайте самоклеющейся лентой.

8. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня продажи; исключая быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения.

Дата продажи: « _____ » _____ 201__ г.

Печать, подпись _____