



Кресло-коляска механическая, серии 1600 **1618C0303Z**

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	8
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	11
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	13

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик кресло-коляски 1618C0303Z.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Кресло-коляска 1618C0303Z является стальной инвалидной кресло-коляской.

1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	сталь
обивка	нейлон
спинка	высота 40см, складная, имеется карман
подлокотники	откидные
подножки	съемные, регулируемые по высоте, с упорами для пяток
абдуктор	нет
колеса	съемные, цельнолитые, обода и спицы выполнены из пластика
диаметр передних колес	8" (съемные)
диаметр задних колес	24" (съемные)
угол наклона сиденья	не регулируемый
вес	18 кг
габариты	66 x 110 x 91 см (в разложенном состоянии) 33 x 64 x 69 см (в сложенном состоянии, без подножек)
габаритные размеры сиденья	(ШхГ) 46 x 40 см
макс. нагрузка	100 кг

гарантия	1 год
производство	Тайвань (Китай)

1.3 Упаковка

В комплектации:

- 2 передних колеса;
- 2 задних колеса;
- 2 подножки;
- 2 Е-образных зажима;
- 2 барашковых винта, втулки, гайки;
- 2 фиксатора



2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

1. Для того, чтобы задействовать тормоза необходимо толкнуть рычаги тормоза вперед.
2. Для того, что ближе подъехать к столу нажмите на кнопки и откиньте подлокотники.
3. Для того, чтобы заехать на бордюр необходимо поставить ногу на бордюр и потянуть вниз ручки кресла-коляски (для сопровождающего лица).
4. Для более легкого прохождения кресло-коляски через дверные проемы, снимите подножки .

Убедитесь, что передние и задние колеса надежно закреплены.


Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 100 кг.

Пересадка на коляску

Пересадка на коляску со стула, кровати и т.д. требует хорошего чувства равновесия.

Убедительная просьба в первое время прибегать к помощи сопровождающих лиц при осваивании навыков по пересадке.

- Расположите коляску как показано на рисунке
- Поставьте коляску на стояночные тормоза
- Расположите передние колеса параллельно друг к другу
- Снимите подлокотники, если коляска оснащена съемными подлокотниками
- Откиньте подножки или расположите платформы для ног на подножках в вертикальном положении
- Ни в коем случае не становитесь на платформу для ног на подножках.

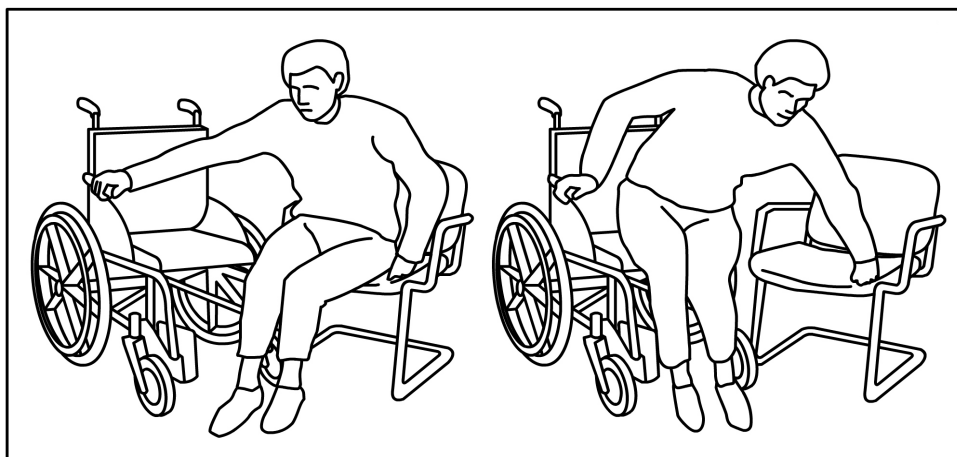


Управление коляской на наклонных поверхностях

- Меняйте положение туловища для сохранения равновесия
- Избегайте резких поворотов или изменения направления движения
- Будьте осторожны при преодолении подъемов с уклоном более 10%

Желательно прибегнуть к помощи сопровождающих лиц.

- Если необходимо остановиться при подъеме на наклонную поверхность, расположите коляску поперек склона.
- Контролируйте скорость при спуске со склонов, надавив на обода на приводных колесах

**Не пытайтесь контролировать скорость с помощью стояночных тормозов.
Это может привести к опрокидыванию коляски.**


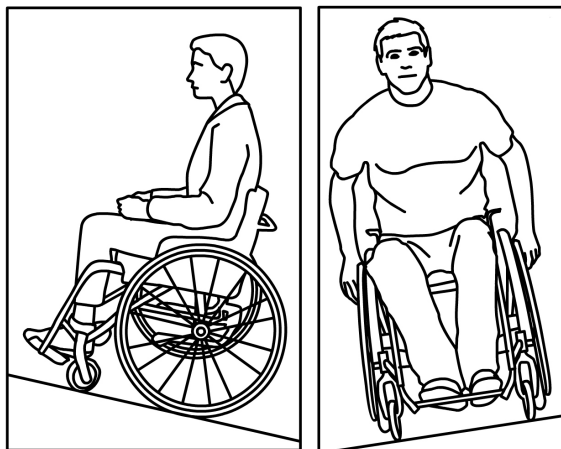


Преодоление препятствий

- Не пытайтесь самостоятельно преодолеть препятствия (тротуары, ступеньки и т.д.) высотой более 100 мм без посторонней помощи.
- Убедитесь, что коляска оснащена ручками для сопровождающих лиц.

Рекомендации для сопровождающих лиц по преодолению препятствий

- При преодолении препятствий всегда становитесь за спинкой коляски.
- Приблизьте передние колеса к препятствию (ступеньке или тротуару) и наклоните коляску на себя.
- Поставьте передние колеса на препятствие и пройдите вперед до касания приводных колес с препятствием.
- Приподнимите слегка коляску и поставьте задние колеса на препятствие.

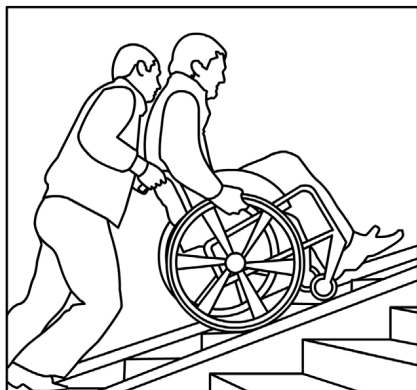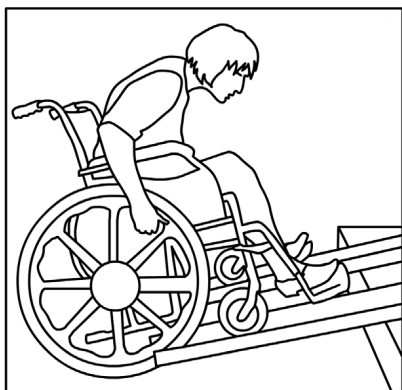

Рекомендации для сопровождающих лиц по спуску коляски с препятствий


- Убедитесь, что ручки для сопровождающих на коляске не проворачиваются.
- При преодолении препятствий всегда становитесь за спинкой коляски.
- Разверните коляску и подведите ее приводными колесами (спинкой) к препятствию.
- Придерживая коляску, аккуратно опустите приводные колеса с препятствия.
- Удерживая равновесие, наклоните коляску на себя и приподнимите передние колеса.
- Сделайте шаг назад и разверните коляску вокруг своей оси, удерживая равновесие на приводных(задних) колесах.

Рекомендации для сопровождающих лиц по преодолению лестничных пролетов

- При преодолении лестничных пролетов прибегайте к помощи двух или более сопровождающих лиц.
- Убедитесь, что ручки для сопровождающих на коляске не проворачиваются и крепко зафиксированы.
- Следует держаться только за несъемные части на раме коляски.
- Убедитесь, что находящийся в коляске человек удобно сидит, а ноги и руки не мешают преодолению препятствия.

При преодолении лестничных проемов следует:

- Приблизить коляску к краю препятствия приводными колесами (спинкой).
- Сопровождающему лицу, который держится за ручки, следует наклонить коляску на себя.
- Второму сопровождающему лицу следует взяться за несъемную часть на передней части коляски и поднять ее на одну ступеньку.

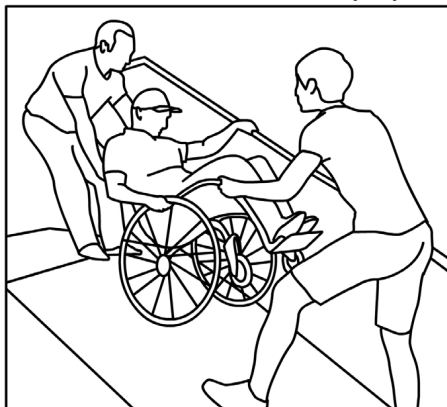

2.2 Порядок работы

1. Раскройте раму коляски, надавите на раму сиденья. Поднимите спинку коляски с обеих сторон в месте, где складывается спинка. Убедитесь, что фиксирующие кнопки полностью выскочили из отверстий.

Соедините верхнюю часть спинки
с нижней

Фиксирующие кнопки должны быть полностью
выскочены из отверстий



2. Раскройте раму коляски, надавите на раму сиденья. Поднимите спинку коляски с обеих сторон в месте, где складывается спинка. Убедитесь, что Фиксирующие шарики должны выскакивать из отверстий.




Красное кольцо должно быть
полностью видимо



3. Вставьте переднее колесо в трубку, предназначенную для переднего колеса. Убедитесь, что дырки расположены на одной линии.



4. Вставьте барашковую гайку в нижнюю дырку. Используйте втулку и гайку для скрепления и фиксации.

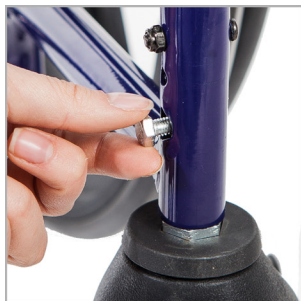

5. Вставьте Е-образный зажим в верхнюю дырку. Повторите те же действия для второго переднего колеса.



6. Расположите на одной линии дырки на подножке и штифты-фиксаторы, находящиеся над передним колесом. Как только штифты-фиксаторы войдут в дырки, поверните подножку к центру кресла-коляски для фиксации.



7. Если необходимо отрегулировать длину подножки, снимите колпачок, находящийся в центре подножки. Отрегулируйте длину подножки и затяните, затем установите обратно колпачок.

8. Складывание и хранение

- Опустите верхнюю часть спинки , путем нажатия на рычаги, находящиеся на спинке кресла-коляски, потяните за ручки кресла-коляски.
- Потяните сиденье вверх.
- Подножки и задние колеса могут быть также убраны для более компактного хранения кресла-коляски.

3. техническое обслуживание

Протирайте сиденье и спинку кресла-коляски с помощью мягкого очищающего средства, воды и щетки. Раму кресла-коляски протирайте мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.

4. условия гарантии

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 12 месяцев от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:

- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя);

- отсутствие на изделии механических повреждений.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации).

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не- соблюдением требований прилагаемой инструкции;

- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской

г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Телефон/факс:(495) 792-31-90

Кресло-коляска механическая 1618C0303Z

Производитель: Valentine International Ltd, Тайвань (Китай).

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Приложение 1

1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что

Кресла-коляски для инвалидов без механического/электрического устройства передвижения серий 1600, 2000, 3000, 4300, 5000, 7000, 8000

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД), 8TH FLOOR, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 945150 Код ТН ВЭД СНГ 8713 10 000 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51083-97, ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006

(Обозначение нормативных документов, соответствию которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: № 20.336.014, 20.335.014 от 27.08.2015 ИЛЦ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФС № 2006/865 от 08.06.2006

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации **10.09.2014** Декларация о соответствии действительна до **08.06.2016**



М.П.

(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc.elmash@gmail.com

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС TW.ME77.D00356 от 10.09.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(Подпись)

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)