

**АРМЕД®**

NON PROGREDI, EST REGREDI

*Кровать функциональная
механическая Armed
с принадлежностями: FS3031W*

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ



Кровать функциональная механическая Armed с принадлежностями: FS3031W (далее по Руководству - кровать) предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях - для профилактики, лечения и восстановления больных. Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как не соответствующее требованиям.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются врачом.

ОПИСАНИЕ

Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами.

Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Основание кровати изготовлено из стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной эмалью.

Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками под дерево и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных перфорированных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами с червячной передачей.

Колеса кровати имеют стальные несущие части, два колеса с индивидуальными педальными тормозами.

Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), которые служат барьером, и по мере необходимости могут подниматься и опускаться

Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Боковые ограждения изготовлены из металла и оснащены рычагами-клавишами для опускания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению и травмам пользователя или персонала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габариты транспортной упаковки (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$), мм	2070x950x155
--	--------------

Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$), мм	2160x980x940
Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$), мм	1920x895
Высота ложа ($\pm 5\%$), мм	500
Диаметр колес ($\pm 5\%$), мм	125
Грузоподъемность, кг	250
Масса нетто (1 шт.)/брутто (1 шт.), кг	75/81
Изменяемый диапазон углов наклона секций	
Головной секции/тазобедренной секции, °	0-80/0-35



Рисунок 1

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открыв упаковку изделия, проверьте целостность деталей, наличие документов и комплектацию.

ПОРЯДОК СБОРКИ

- 1) Установите опоры с колесами так, чтобы крепежные отверстия на опорах совпадали с соответствующими отверстиями на раме. Зафиксируйте ножные опоры на раме при помощи элементов крепежа.
- 2) По углам кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинок поднимите фиксаторы на спинках, и установите спинку для кровати головную и спинку для кровати ножную. Опустив фиксаторы, спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - блокируются.
- 3) Установите ограждения боковые (рейлинги) в соответствующие пазы рамы кровати и закрепите их болтами.
- 4) При необходимости использования устройства для подтягивания, стойки-держателя для внутривенных инъекций и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия на раме ложа и на опоре с колесами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов. Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки. Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- колеса заблокированы;
- никакие препятствия - ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. - не мешают регулировке;
- все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к эксплуатации кровати.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) Регулировка кровати

Ручки рычагов регулировки наклона секций оборотно-складного типа. В исходном положении находятся под спинкой для кровати ножной. Рычаги регулировки оснащены механическим приводом с червячной передачей.

Правый рычаг - для регулирования наклона тазобедренной секции, левый рычаг - для регулирования наклона головной секции. При использовании рычагов кровати, застопорите кровать с помощью педалей на колесах в ножной и головной части кровати. Вращая ручку, привести секцию в необходимое положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При изменении углов наклона секций кровати всегда удостоверьтесь в отсутствии препятствий (например, конечности пользователя, предметы, дополнительное оборудование). Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению оборудования.

2) Ограждения боковые (рейлинги) для кровати легко складываются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пользователю. В ножной части ограждения бокового (рейлинга) расположен рычаг-клавиша. При нажатии на клавишу снизу вверх ограждение боковое (рейлинг) легко опускается, при подъеме - ограждение боковое (рейлинг) без усилий фиксируется.

3) На раме ложа имеются по два отверстия для установки дополнительных аксессуаров, таких как стойка-держатель для внутривенных инъекций, устройство для подтягивания и т. п., на одной из опор с колесами кровати имеются два отверстия для установки подставки для судна.

4) Колеса необходимы для передвижения кровати, во всех остальных случаях колеса, оснащенные индивидуальными тормозами, должны быть заблокированы.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Проводите дезинфекцию кровати в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кровати обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

В случае подозрения на наличие повреждений или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации для ремонта или замены неисправных частей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Кровать в упаковке завода-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С, относительной влажности не более 80%.

2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

3. Кровать транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4. Транспортировка и хранение кровати без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кровати. Повреждения кровати, полученные в результате транспортировки или

хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Кровать не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кровати осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кровать _____ 1 шт.

Комплект крепежа _____ 1 уп.

Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кровати, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

АКСЕССУАРЫ (дополнительно)

Матрас с чехлом (Д x Ш x В, мм) - 1900 x 850 x 80

Матрас изготовлен из полиуретана. Чехол съемный, на «молниях», из ткани с водоотталкивающей пропиткой и воздухопроницаемыми клапанами.

ВНИМАНИЕ

 **Матрас с чехлом не входит в комплектацию кровати и заказывается отдельно.**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кровать функциональная механическая Armed с принадлежностями: FS3031W соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07958 действительно с 08.10.2010 г.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (Ltd.),

5 Xingfu RD, Zona A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (ЛТд)",

5 Ксингфу РД, Зона А, индустриальный парк Шишан, район Нанхай, город Фошан, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 6 лет.

Гарантийный срок на кровать функциональную механическую Armed с принадлежностями: FS3031W – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург (812) 702-73-02

г. Екатеринбург (343) 357-33-61